

（中频治疗仪，定向透药治疗仪耗材）一次性理疗电极片,超声耦合贴片

产品名称	（中频治疗仪，定向透药治疗仪耗材）一次性理疗电极片,超声耦合贴片
公司名称	郑州大鲸医疗科技有限公司
价格	35800.00/件
规格参数	品牌:大鲸 型号:DJ-VII 产地:河南
公司地址	郑州市高新技术产业开发区冬青路10号1号楼4层4号
联系电话	15093291270 15093291270

产品详情

疗电极片有很多规格、尺寸、材质。多用于中低频类、产后盆底类、定向透化类、吞咽障碍类等多种结合理疗贴片完成理疗的设备上。我们首先来讲解一下水凝胶型材质的理疗电极片，在外观上分方形、圆形、异形、蝶形等形状。材质主要由无纺布、水凝胶、离型纸、导电线组成。可以根据你的要求，改变耗材的外观，从而使贴片和仪器使用中更加贴合。其实我们讲一下透化用的电极片，有正方形、长方形等外观。中间一般都会含棉片。通常由无纺布、离型纸、导电线组成。电极片材质透软，体感舒适，可紧密贴敷于人体，无纺布透气性好。电极片规格款式多样，有纽扣式电极片和插针式电极片两种，插针式的针孔直径有2.0mm、2.5mm、5.0mm等多种型号，适配于市面上的主流机型。有水凝胶电极，脑电电极，吞咽电极，乳腺电极，体表电极，自粘式电极等，有纽扣和插孔等形式，适用科室广。

使用方法:

使用本品前，先清洁要粘贴的部位。

撕开包装袋，将本品与中(低)频脉冲治疗仪的导线连接好，揭开护胶片，将粘胶片直接粘贴于所需部位。

打开机器开关，按治疗仪的说明书操作机器。使用完后先关掉开关，再取下粘胶片存放好，以备下次使用。

禁忌症

皮肤有炎症或溃烂的患者禁止使用。心脏内放有金属支架的患者禁止使用乳腺电极片。