

# 远红外理疗贴

产品名称	远红外理疗贴
公司名称	吉林省国大生物制药有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	吉林省长春市北湖科技开发区航空街3999号2
联系电话	15043012348 15590036392

## 产品详情

### 远红外理疗贴 失眠贴

【产品性能】磁贴贴面应洁净、平整、色泽均匀、无污渍；边缘整齐，不允许有破洞、渗胶、污渍。其他详见产品技术要求。

【结构及组成】本品是由远红外陶瓷粉、磁性物质（磁粉）、基质（热熔胶）、防粘纸及医用透气胶带组成。

【适用范围】用于促进局部血液循环，用于镇痛、失眠的辅助治疗。

【使用方法】1、每晚一贴，睡觉前30~60分钟内开始使用，次日晨起时结束。

2、使用前先将前额和眉心（印堂穴）擦净擦干，撕开包装取出贴剂，在他人的帮助下，或对着镜子，将贴片贴于前额对准印堂穴。

### 远红外理疗贴 胃炎贴

【结构及组成】本品是由远红外陶瓷粉、磁性物质（磁粉）、基质（热熔胶）、防粘纸及医用透气胶带组成。

【适用范围】

该产品用于促进局部血液循环、辅助消炎、消肿和止痛。适用于慢性胃炎、慢性结肠炎的辅助治疗。

【使用方法】清洁患处、确认包装无破损后，打开包装，取出本品，将理疗贴的隔离膜撕去，贴于患处，每贴4-6小时，每天1-2次。