

鱼跃制氧机8F-5AW带雾化氧疗机医用家用吸氧机孕妇老人5L升氧气机

产品名称	鱼跃制氧机8F-5AW带雾化氧疗机医用家用吸氧机孕妇老人5L升氧气机
公司名称	山东美特斯商贸有限公司
价格	4500.00/件
规格参数	品牌:鱼跃 型号:8F-5AW 产地:江苏
公司地址	山东省济宁市任城区安居街道聚源食品城
联系电话	0537-3531358 15053756795

产品详情

公司名称：山东美特斯商贸有限公司

型号: 8F-5AW

品牌: 鱼跃

注册证号: 苏械注准20142080095

产品名称: 医用分子筛制氧机

生产单位: 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

产品适用范围: 供医疗机构、家庭制取氧气供缺氧患者给氧使用

产品参数：

功率：500VA 氧气流量：1~5L/min 售后：整机保修1年,压缩机3年

主要原料：UOP分子筛 噪音：标准测值60dB(A),鱼跃测值48dB(A)

净重：15.5kg

氧气浓度：0.5~5L/min时,93%±3% 外形尺寸：39x24.5x50cm

压缩机：爱普力

UOP分子筛

标准测值60dB(A),鱼跃测值48dB(A)

注意事项：

特别警告

为防止停电或制氧机可能出现故障，急需用氧者及重症病人必须配置其它备用供氧装置(如:氧气瓶、氧气袋等)!该设备适用于氧气补充，不作为生命支撑与生命延续给氧用!

使用概要

- 1.选择室内制氧机使用*便利的房间，可以通过脚轮将它方便地从一房间移到另一房间。
- 2.不得将制氧机放置再气流阻塞的环境中。
- 3.制氧机应放置于室内通风处，并避免阳光直射，所有侧面距墙壁、家具等类似物10cm以上。避免成堆的地毯、加热器、电暖炉或热空气通风设备。不能将制氧机放置在狭窄的范围内。
- 4.制氧机不得置于以下环境中:热源及明暗火源附近、潮湿、无遮挡、有烟雾及污染、温度过高或过低的环境。
- 5.制氧机应该避免被放置污染物或烟雾处。
- 6.制氧机顶部不得放置杂物及水油容器。
- 7.制氧机底部禁止放置任何杂物，且禁止将机器放置在会导致倾斜或下沉的柔软表面(如床、沙发)。防止进、排气口堵塞引起温度过高而造成停机或氧浓度下降。防止进、排气口堵塞引起温度过高而造成停机或氧浓度下降。