

鱼跃制氧机9F-3AW家用医用吸氧雾化老人氧气机制氧器3升医用吸氧 机带血氧

产品名称	鱼跃制氧机9F-3AW家用医用吸氧雾化老人氧气机制氧器3升医用吸氧机带血氧
公司名称	山东美特斯商贸有限公司
价格	4900.00/台
规格参数	品牌:鱼跃 型号:9F-3AW 产地:江苏
公司地址	山东省济宁市任城区安居街道聚源食品城
联系电话	0537-3531358 15053756795

产品详情

公司:山东美特斯商贸有限公司

产品详情：型号机型：9F-3Aw3升机 氧气浓度：1-3L流量时93+3%
体积：50*21*64cm净重：16.5KG雾化：带雾化 噪声：正面46dB(A)(平均)，整机50dB(A)

看得见的氧气大屏高清背光显示

全角度的高清大屏清晰的看到制氧机的状态。血氧饱和度检测

利用检测血红蛋白对不同波长的光吸收的区别，可测出使用者的血氧饱和度，吸氧效果看得晃。

医用级稳定供氧93%±3%氧浓度5L/min出氧量

符合医用级标准，采用进口分子筛等核心部件，让机器持续稳定供氧。

智能遥控

简单小巧的红外无线遥控器一手掌控吸氧的时间与状态。

重量轻

机身重量21.5kg，体积小容易存放、移动和携带。

稳定供氧核心科技铸就高品质

进口分子筛和爱普力无油压缩机，使得9F-5AW制氧机的寿命更长、性能更强、更稳定

特别警告

为防止停电或制氧机可能出现故障，急需用氧者及重症病人必须配置其它备用供氧装置(如:氧气瓶、氧气袋等)！该设备适用于氧气补充，不作为生命支撑与生命延续给氧用！

注意事项

- 1.选择室内制氧机使用*便利的房间，可以通过脚轮将它方便地从一房间移到另一房间。
- 2.不得将制氧机放置在气流阻塞的环境中。
- 3.制氧机应放置于室内通风处，并避免阳光直射，所有侧面距墙壁、家具等类似物 10cm 以上。避免成堆的地毯、加热器、电暖炉或热空气通风设备。不能将制氧机放置在狭窄的范围内。
- 4.制氧机不得置于以下环境中:热源及明暗火源附近、潮湿、无遮挡、有烟雾及污染、温度过高或过低的环境。
- 5.制氧机应该避免被放置污染物或烟雾处。
- 6.制氧机顶部不得放置杂物及水油容器。
- 7.制氧机底部禁止放置任何杂物，且禁止将机器放置在会导致倾斜或下沉的柔软表面(如床、沙发)。防止进、排气口堵塞引起温度过高而造成停机或氧浓度下降