

足浴盆、足浴养生机、家用足浴盆

产品名称	足浴盆、足浴养生机、家用足浴盆
公司名称	河南传承医疗器械公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州郑东新区商务外环路九如路王鼎国际大厦1002室
联系电话	0371-66758993 15890085326

产品详情

足浴适宜人群 1、睡眠不良、体虚、畏寒者； 2、贫血、静脉曲张及其他心脑血管疾病患者； 3、肾虚、胃寒者； 4、内分泌不良、微循环不畅、少出汗者； 5、长期站立、久坐或用腿工作者； 6、四肢寒冷或生活在寒冷地区者； 7、关节、骨骼、颈椎病患者； 8、疲劳、精神紧张、皮肤干燥等问题。使用说明

1、先向桶内倒入适当的冷水或温水，以淹没住冲浪孔或到冲浪孔以上1厘米的地方为水位线处；
2、接通电源，拨动功能旋钮开关； 4、足浴完毕，关闭温度调节开关，用自动排水管两头插入冲浪孔内，将另一端放到排水处开始排水，排水完毕，此时机器停止所有功能； 5、接下来轻轻拔下电源插头，将水倒光，用双手取出机器足跟部的滤网盖和过滤网，并冲洗干净再装上，并将机器存放于通风干燥处。如果发现有任何器件短缺的情况，请及时与经销商联系！浴常识

1.使用该机前，应该将本机安置于水平位置，最好能固定插头，固定位置使用； 2.原则上每天使用两次，早晚各一次，每次30分钟，水温以42 为宜，连续坚持足浴1-2个月后，你会惊喜的发现，平时的好多症状在不知不觉中消失；

3.热浪足浴时，全身毛孔呈开放状态，所以请勿吹电扇和空调冷气，以免导致感冒； 4.每次使用足浴盆时，该机将加速体内新陈代谢，全身汗腺打开，以致出汗，请多喝水，使用前后一般饮250毫升温开水； 5.在开启气波臭氧功能浴足时，水中的污垢会囤积在机器内壁，使用完毕后一定要擦干净； 6.饭前饭后一小时后浴足比较适宜，足浴完毕后不要马上站立离开，先做三次深呼吸，再闭目养神2-3分钟，然后在走动。