

# 医用痔疮凝胶 源头工厂 OEM定制生产

产品名称	医用痔疮凝胶 源头工厂 OEM定制生产
公司名称	吉林省博仕佳医药有限公司
价格	.10/件
规格参数	
公司地址	长春市绿园区西安大路3999号金地梧桐华府7号楼2层207室（注册地址）
联系电话	13910589912

## 产品详情

【产品名称】医用痔疮凝胶

【型号、规格】5g/支、10g/支、15g/支、20g/支、30g/支、40g/支、50g/支

【结构及组成】该产品由凝胶、聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管或聚乙烯一次性使用推注器组成。其中凝胶由卡波姆、苯氧乙醇、甘油、依地酸二钠、三乙醇胺及纯化水制成。

【适用范围】该产品通过在痔疮及肛周部位创面形成保护膜，将肛部痔疮部位与外界细菌物理隔离，从而阻止病原微生物定植。用于痔疮创面及痔疮术后创面的护理，缓解痔疮引起的肿胀、疼痛、黏膜充血、肛门坠胀等症状。

【产品性能】pH值6.0~8.0；动力粘度  $25 \pm 1$  时  $50\text{Pa} \cdot \text{s}$ ；重金属含量（以Pb<sup>2+</sup>计）应不大于10  $\mu\text{g/g}$ 。

【使用方法】本品外用。内痔取一次性使用推注器安装在软管头部，将一次性推注器插入肛门1-2cm处把凝胶挤入肛门内即可；每次使用之前请更换一次性使用头。外痔直接将内容物挤出，轻涂于患处，每日一次，宜睡前或便后使用。2周一个疗程，重症者早晚各一次。

【禁忌症】对本品过敏者禁止使用，过敏体质者慎用。

【注意事项】1.本品为外用药，禁止内服。2.用毕洗手，切勿接触眼睛、[口腔](#)等黏膜处。3.忌烟酒及辛辣、油腻、刺激性食物。4.保持大便通畅。5.内痔出血过多或原因不明的便血应去医院就诊。6.本品性状发生改变时禁止使用。7.儿童必须在成人监护下使用。8.请将本品放在儿童不能接触的地方。9.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。10.开启后一个月内使用。11.使用本产品症状无缓解，请及时就医。

【有效期】二年

【生产日期/生产批号】见外包装

【贮存】通风、干燥处贮存。

【运输】产品在运输过程中应避免日晒、雨淋及重压。

【配件清单】医用痔疮凝胶、一次性使用推注器、说明书

【生产许可证编号】晋食药监械生产许20200012号

【注册证编号】晋械注准20222140029

【产品技术要求编号】晋械注准20222140029

【注册人名称/生产企业/售后服务单位】山西健康之路医疗器械有限公司

【注册人住所/生产企业住所】侯马经济开发区科技创新孵化园标准厂房1栋厂