

# 为什么要使用YN-H一次性滑移垫

产品名称	为什么要使用YN-H一次性滑移垫
公司名称	济南盈诺医用设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市颖秀路2766号留学人员创业园北楼741
联系电话	027-85865859 18560167037

## 产品详情

### yn-h一次性滑移垫

#### 为什么要使用一次性滑移垫？

如何在医疗和护理过程中轻松快速的转移病人，是个困扰医院的常见难题。以前从车/床/台之间转移病人通常需要多人手脚并用，非常吃力，特别对于重病人、肥胖病人、手术后病人等，尤其费神费力，甚至会因不恰当的搬运方法导致病人的二次损伤，也无形中加重了病人家属和医护人员的劳动强度。因此，病人转移难成为困扰医疗护理行业多年的顽疾，广大病患家属和医护人员期盼着能真正带来福音的科学解决方案，换言之，行之有效的病人转移解决方案将成为医械产品市场有巨大需求潜力的产业。

盈诺医疗作为全国唯一一家定位于手术室、外科辅助器材的专业制造商，一直专注于病人转移方案的研究，经过多年不懈的努力，试验改进了上百种材质和方案，生产出“yn-h型一次性滑移垫”一种一次性病人转移耗材，以其独特简易的工作原理，巧妙的实现了病人随时随地轻松转移，其科学实用独特的临床价值，创造性的解决了医护界的常见困扰，是国内病人转移方案的开创者和领导者。

#### 产品介绍

**产品组成：** 本产品由一次性滑动布套与垫板组成的滑移垫、一次性中单、吸水垫构成；滑移垫既可单独使用，也可与一次性中单（床单）配合使用。

#### 工作原理：

该一次性滑移垫耗材利用两种不同特殊材料之间的滑动性，在外力的推动下，形成类似传动带的效果，病人好像在一条传动带上似的被过床，使原来费时耗力的过床变得轻松容易。滑移垫与一次性中单（床单）配合使用，更能省力，并且将病人整体过床，减少二次损失，特别适用于骨折、肥胖、麻醉后病人等。

一次性滑移垫可以帮助医护人员解决以下难题：

### 1.不再费神费力：

滑移垫仅需1-2人即可将病人过床，代替原来需4-5人才能完成的工作，省力省时，可以大大减轻医护人员劳动强度。 2. “病人不动式”过床：

骨折、手术后病人因为病痛或术后带有引流管等，往往不能搬动或触碰，一次性滑移垫与中单或床单配合使用，拉动中单或床单将病人过床，类似传送带转移物品，传送带一直转动，但放在上面物品是保持不动的，病人完全不被搬动或触碰，即可平稳安全地被转移。 3.有效避免二次损伤：

以往的搬运方法，采用多人在不同的部位、不同的用力大小抬送，病人极易感到不适，甚至还会因为搬运的不恰当方式导致病人损伤，滑移垫能让病人整体过床，避免二次损伤，实现轻松舒适整体转移。另外，有支撑力的垫板能起到保护病人的骨骼以及在车/床/台之间转移时可能发生的硌伤、拉伤等。 4.可以广泛使用：

滑移垫可在有一定高度差的情况下使用，故可广泛用于医院各科室手术台/病床/推车/ct台/x线检查台之间过床。

**适用范围：**该一次性滑移垫耗材适用于手术室/急诊/icu/病房/ct室/x线室/康复室等科室，医护人员将病人在手术台/病床/推车/ct台/x线检查台之间过床，以及康复或重病人护理中，病人被移位/侧身/清洁等。

**特点：**轻便：重量为2.6kg，并可折叠 透x光：放射检查时不必抽出

**规格参数：**170x50cm(可根据用户要求定制)

为什么要代理经销yn-h一次性滑移垫？

### 全国独家，技术领先

一次性滑移垫是盈诺医疗研发生产的具有多项专利的新型产品，全国独家研发生产，行业技术领先。该产品效果独特，简单易操作，有效解决了病人转移难的医护顽疾，得到临床医患的极大关注和认同。

### 一次性耗材，市场空白，需求量大

本产品适用于医院包括手术室在内的各个科室，住院病人从入院到出院整个住院期间，只要有需要转移的情况，都可以使用，使用范围广泛，填补了市场空白，需求潜力巨大。

**易操作，空间大**

本产品主要面向护理人员，简单易操作，代理价格合理，空间大易操作，获利快。