

远红外治疗凝胶贴牌生产厂家 OEM贴牌

产品名称	远红外治疗凝胶贴牌生产厂家 OEM贴牌
公司名称	山西健康之路医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:万物通 型号:远红外治疗凝胶OEM贴牌 产地:山西
公司地址	开发区工业园锦茂标准厂房
联系电话	13121323687 13165116173

产品详情

远红外治疗凝胶OEM贴牌生产厂家：山西健康之路医疗器械有限公司。

【产品名称】远红外治疗凝胶

【型号、规格】10g/支、20g/支、30g/支、50g/支、100g/支、150g/支、200g/支

【结构及组成】本产品由远红外陶瓷粉、卡波姆、甘油、海藻酸钠、羧甲基纤维素钠、三乙醇胺、苯氧乙醇、纯化水组成。包装为聚乙烯/铝/聚乙烯复合软管（或聚酯瓶）。

【适用范围】本产品促进局部血液循环、辅助消炎、消肿和止痛。适用于肩周炎、关节炎、颈椎病、腰椎间盘突出、腰肌劳损、骨质增生、滑膜炎、腱鞘炎、扭挫伤等引起不适症状的辅助治疗。

【产品性能】pH值：pH值范围为6.0-8.0；动力黏度：20 ±1 时 50Pa·s；重金属：重金属含量（以Pb+计）应不大于10 μg/g；远红外性能：远红外波长范围在4 μm -16 μm；法向发射率不低于0.80。

【使用方法】使用前清洁皮肤表面，取本品适量涂抹于患处，轻轻按摩。根据不同部位的严重程度可选择每天一次或多次使用。

【禁忌症】

- 1.皮肤破损、溃烂、感觉障碍、急性闭合性损伤、化脓性感染及急性期炎症患者、恶性肿瘤、活动性结核、精神类患者，皮肤病、严重糖尿病、高热患者禁用；
- 2.具有原发性心、肝、肺、肾疾病及严重的心、肝、肺、肾衰竭的患者禁用；
- 3.出血及有出血倾向者禁用；
- 4.孕妇禁用；
- 5.对产品过敏者禁用。

【注意事项】

- 1.本品外用，禁止口服；
- 2.请勿放置于儿童可接触的位置；
- 3.请在产品有效期内使用，如遇包装破损，请勿使用；
- 4.每次使用后请拧紧，开封后请在30天内使用；
- 5.切勿接触口腔、眼睛等黏膜，如果不慎入眼，请用大量清水冲洗或及时就医；

6.腱鞘炎、扭挫伤急性期慎用。

【有效期】二年

【生产日期/生产批号】见外包装

【贮存】应贮存在通风干燥处，无腐蚀性气体和通风良好的室内。

【运输】产品在运输过程中应避免日晒、雨淋及重压。

【配件清单】远红外治疗凝胶、说明书。

【医疗器械生产许可证编号】晋药监械生产许20200012号

【医疗器械注册证编号】晋械注准20232090053

【医疗器械产品技术要求编号】晋械注准20232090053

【注册人名称/生产企业】山西健康之路医疗器械有限公司

【注册人住所/生产企业住所】侯马经济开发区科技创新孵化园标准厂房1栋厂房

【生产地址】侯马经济开发区科技创新孵化园标准厂房1栋厂房，曲沃县乐昌镇苏村东华街1号

请仔细阅读产品说明书或在医务人员的指导下购买和使用