

高级小屏幕液晶自动电脑心肺复苏模拟人（2010新版）、成人中心

产品名称	高级小屏幕液晶自动电脑心肺复苏模拟人（2010新版）、成人中心
公司名称	上海中弘科教设备有限公司
价格	8800.00/套
规格参数	
公司地址	上海市松江区中辰路225号-11
联系电话	021-64049756 13661681239

产品详情

产品名称：

[高级小屏幕电脑心肺复苏训练模拟人](#)、[高级小屏幕液晶自动电脑心肺复苏模拟人（2010新版）](#)、[成人心肺复苏训练模拟人](#) 型号：ZH/CPR400 品牌：中弘科教

产品介绍: 该心肺复苏模型产品采用美国心脏学会(AHA)2010国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）新指南标准设计，并在原来的普通型的基础上进行升级，率先开发出专门针对社会心肺复苏普及与医学院校、医疗卫生系统培训使用的高档型新产品，其造型更完美、功能更强大、操作更方便的领先新指南标准心肺复苏模拟人产品。

执行标准：美国心脏学会(AHA)2010国际心肺复苏(CPR) & 心血管急救(ECC)新指南标准。功能特点：

- 模拟标准气道开放； 人工手位胸外按压指示灯显示，数码记数显示，语言提示；
- 按压位置正确，错误的指示灯显示，数码记数显示，错误的语言提示； · 按压强度正确（5-6cm区域），错误（5-6cm区域）的显示分别由条形（黄绿红）数码指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度正确，错误的数码记数显示及错误的语言提示；
- 人工口对口呼吸（吹气）的指示灯显示、数码计数显示、语言提示： · 吹入的潮气量500ml-600ml-1000ml的显示分别由条形（黄绿红）数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量度；正确、错误的数码计数显示及错误的语言提示； · 每吹气一次或胸外按压一次，心跳多会在液晶屏上显示一次心电图，操作成功后，电脑显示器上的液晶屏上会显示正常动态的心电图；
- 按压与人工呼吸比：30 2（单人或者双人）；

2010（新标准）：先C胸外按压 A开放气道 B人工呼吸操作流程。

操作周期：先有效胸外按压30次再有效2次人工吹气既30：2五个循环周期CPR操作；

操作频率：最新国际标准：至少100次/分钟； 操作方式：训练操作，考核操作；

操作时间：以秒为单位时间计时； 语言设定：可进行语言提示设定或关闭语言提示设定；

成绩打印：操作结果可热敏打印成绩单； 模拟人生命体征变化：初始状态时，模拟人瞳孔散大颈动脉无搏动，按压过程中颈动脉被动搏动搏动频率与按压频率一致，抢救成功后模拟人瞳孔恢复正常颈动脉自主搏动。

电源状态：采用220V外接电源，经过稳压器输出电源24V。材料特点：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。标准套配置：

高级复苏全身模拟人一具；
高级小屏幕电脑显示器一台； 豪华手拉式人体硬塑箱一只； 复苏操作垫一条；
一次性消毒屏障面膜（50张/盒）一盒； 可换肺囊装置五套； 热敏打印纸两卷；
使用手册一本； 2010国际最新操作指南光盘1盘