

# 长坤HQ-808臂式语音电子血压计

产品名称	长坤HQ-808臂式语音电子血压计
公司名称	深圳市长坤科技有限公司
价格	138.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡固戍航城大道华丰第二工业园愉盛楼西座
联系电话	86-075529555730 15013600560

## 产品详情

产品说明：

A. 产品参数：

型号：HQ-808智慧型

品牌：长坤

类型：臂式血压计（智慧型）

产品净重量：105g

产品尺寸：约103.5\*126\*62mm

臂带尺寸：490mm\*150mm

臂带质量：123.5g

空气管长：600mm

包装尺寸：15.05\*10.3\*8.3cm

显示屏：液晶数字显示荧屏

测量范围：血压20-280mmHg 脉搏40-165次/分钟

加压方式：智慧型加压方式

减压方式：全自动减压方式

测量误差:血压  $\pm 3\%$  心率  $\pm 5\%$

记忆容量：可记忆60组测量数据及时间

压力感应：半导体压力感应器

电源：电源或电池

测量间隔：1mmHg

操作温湿度：+10 ~+40 /40%~85%R.H.

保存温湿度：-20~ +50 /15%~90%R.H.

腕带范围：135~195mm

B. 产品特点：

智慧型加压

90组数据记忆功能

WHO血压健康状态警示条

心率不齐提示功能

超压保护功能

智能化自动关机功能

可顺序查询每组测量结果

C. 测量姿势：

挺直身体，保持正确坐姿。注意不要让身体前倾弯曲

脱去较厚的衣物，露出上臂或穿贴身薄衣进行测量。

测量前深呼吸5~6次后，恢复自然呼吸，放松肩部和手臂让全身松弛

测量时，保持臂带中心与心脏部位与同一高度。

D. 注意事项：

臂带的位置与心脏的高度不同时，由于血液自身的重量，血压值发生变化。臂带的位置高于心脏位置时，血压值低；相反，臂带的位置低于心脏位置时，血压值高（每差10cm高低，约有8mmHg(1kPa)的变化）。虽然臂带位置适中，但将手掌紧握成拳头时，血压值有可能过高。请勿用另一只手托住手腕，否则会造成误测。

平躺姿势也可测量血压，因人而异会出现不同的血压值。请勿长时间反复测量，反复测量时由于手臂受迫血液流通不畅，则有可能测量不到正确的血压值

以下情况有可能引起血压变化而与正常的血压值产生差异

1. 喝酒、咖啡、红茶后
2. 吸烟后
3. 入浴后
4. 用餐后三个小时内
5. 腹部受压的姿势

测量时的建议

1. 排尿、排便后进行测量
2. 室温在20 左右的安静的地方进行测量
3. 心情舒畅时或深呼吸后进行测量
4. 以正确姿势在每天固定的时间进行测量