

朗黛M6负压塑形纤体仪

产品名称	朗黛M6负压塑形纤体仪
公司名称	蓝海科技美容仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	广州工厂：芳村花地大道南 // 济南分公司天桥区汽车厂东路
联系电话	18666603801/0531-8006392 18660788835

产品详情

美容会所必备的高端纤体塑形设备--M6纤体减肥仪

M6工作原理 法国 LPG M6纤体塑形仪是拥有二十年历史的法国“深层负压按摩”(Endermologie)技术的第四代，它的全称是法国LPG CELLU M6 Keymodule 纤体塑形仪。工作原理：M6采用崭新的纤体科技利用负压吸力及独特的滚轴设计，将皮肤连皮下肌肉组织向上拉起，再通过真空吸力前后滚轮的作用，有步骤地针对表皮、真皮及皮下脂肪层进行波浪式深层按摩，对皮肤及脂肪组织进行吸、捏、滚等机械有氧运动。加上吸力产生的压力，打散脂肪，使脂肪组织松弛，同时把脂肪转化脂肪酸，并通过淋巴循环排走，这种负压深层按摩能使淋巴排毒功能增加四倍，使皮肤血液循环状况增加四倍，使身体更加有效地消耗积聚脂肪，排除体内过多水分及毒素，消除蜂窝组织并减轻体重，达到瘦身纤体的效果。同时促进皮肤的新陈代谢，使皮肤制造更多的胶原蛋白和弹性纤维细胞，增加皮肤的弹性。治疗时需穿上特制的紧身衣，把身体固定，令滚筒能顺滑地给身体作深层按摩。利用不同布满窝槽孔的滚轴治疗机头对治疗部位产生微空泡物理刺激。同时透过滚轴治疗机头的吸啜，皮肤受到每平方米1,180个的微空泡物理刺激，不需在某点施力拉扯，亦能对厚组织刺激，因而不伤皮 微空泡物理刺激--3重作用

1. 滚轴向前转动，抽起皮层，将皮肤置于机械力物理刺激滚轴平面。
2. 滚轴上每个窝槽孔深入刺激细胞内微细组织。
3. 密集式吸啜动作产生机械张力，在细胞及细胞隙间产生液压差异，从而促进微循环。

滚轴治疗机头窝槽孔 纤微吸啜刺激纤维母细胞，令增生胶原蛋白与弹性纤维。

- 1). 治疗机头治疗机头的器械原理 - 吸力分散机制 强大负压吸力平均分配在滚轴上众多窝槽孔，使滚轴接触皮肤的边沿不需牢牢吸啜拉扯，所以不损伤皮肤。唯一可自动滑行的吸气滚轴负压按摩技术

治疗机头的器械原理 - 滚轴双向转动机制

每个程式配置不同滚轴走向、吸力模式及频率，配以相关手法路线，达致最佳疗效

两个滚轴可同向向前转动（塑形）两个滚轴双向向内转动（纤体）

两个滚轴双向向外转动（紧肤）治疗机头的器械原理 - 3种吸力分布刺激机制

大机头重点治疗可加强负压能量，透过滚轴上窝槽孔将吸力分散，但同时加大刺激范围，加速效果，却不损皮肤，并感觉更加舒适

操作时间：每次20-30分钟一个部位，全身1个半到2个小时

10次为一疗程，3天一次