

水雕透析冰膜仪

产品名称	水雕透析冰膜仪
公司名称	蓝海科技美容仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	广州工厂：芳村花地大道南 // 济南分公司天桥区汽车厂东路
联系电话	18666603801/0531-8006392 18660788835

产品详情

一、水雕透析冰膜仪原理概论：水雕透析冰膜仪融合韩国、意大利、欧美等国际化的顶尖技术，由水雕焕肤技术、细胞透析技术、细胞置换、无痕魅眼、冰雕膜透五大技术组合而成的唯一一款让您时光倒流以及永锁青春的水雕透析冰膜仪，也是一款全新的安全有效检测治疗一体的高端美容仪器，已受到各国的明星们的热宠，水雕透析冰膜仪将会普遍全世界。二、水雕透析冰膜仪原理及优势：1、水雕焕肤：采用水置换及低压原理，通过对内环境水分子进行处理，快速解决呼吸不通畅的肌肤，疏通淋巴、祛除表皮污垢、祛除表皮代谢的角质以及内环境水被各种色素污染。人性化的配合不同密度的水雕网面，适用于任何肤质，彻底取代了微雕磨皮，水晶砂磨皮，注氧补水。利用水动力循环系统，把离子基因水直接进行毛孔内壁上的附着物进行全面清洁。彻底清洁皮肤的同时不会令毛孔变的粗大，同时又可以给皮肤补充大量的水分。还可以起到雕塑面部轮廓，收紧等作用。仅仅一个清洁步骤，就能让你的肌肤达到清爽通透，水嫩新生的感觉。2、细胞透析：通过内置微型透析系统，定点、定位探测皮肤问题。针对皮肤问题进行有效治疗。运用双效载波电频技术及四极射频技术自动切换功能定位定点定量地输送营养分子到达细胞层同时改变加速细胞微循环流动量，使营养分子更有效地渗透进入细胞层，起到延缓细胞衰老的作用。3、细胞置换：可瞬间增强皮肤组织的渗透性，在生物电刺激的作用下，细胞的脂质二重层上形成微小间隙。在电击孔形成的同时，使得原先无法被细胞吸收的亲水性分子能够穿透并进入细胞内部。间隙空一旦形成，则根据电击的长度，在数秒种至数分钟之内保持打开状态，有效地帮助营养分子补充进细胞质里面。4、无痕魅眼：采用仿人体生物射频能量以及生物微电原理，反复刺激肌肉、加速血液循环、促进新陈代射、刺激眼部皮脂腺的分泌迅速祛除眼袋、眼角纹、黑眼圈等衰老标志，使眼部重新焕发青春。5、冰雕膜透：独特的水冷系统控制下，几秒钟之内瞬间达到0摄氏度，打破了8摄氏度的常规，而且周而复使地维持在0摄氏度以下。快速治疗红肿、过敏等现象。起到塑形提升的作用。三、水雕透析冰膜仪功效（采用独特炫美五部疗法）：1、水雕焕肤：深层清洁、疏通淋巴、温和祛除皮肤代谢的角质、瞬间美白与光滑肌肤。2、细胞透析：定位定点定量地给皮肤输送营养补充胶原蛋白，及时唤醒肌肤沉睡的细胞。3、细胞置换：刺激面部穴位并疏通经络，在细胞活跃的状态时，快速将营养物质定时定量渗入皮肤欲需改善的部位，提高肌肤免疫力与代谢能力，由里至外的改善健康肌肤疗效。4、无痕魅眼：针对眼部综合性的治疗与修复，提升紧致，全面进行抗衰老。5、冰雕膜透：祛红、祛黄、缓解过敏皮肤，改善过敏问题，塑形提升。四、建议面部护理操作步骤：第1步：细胞透析：打开细胞透析功能，利用内置透析系统检查皮肤状况，对皮肤全方面进行一次有效地诊断。第2步：水雕焕肤头：根据客人皮肤类型选择不同密度的水雕网面，左右两边杯进行75%

酒精消毒,将左下方进水杯装入纯净水,右下方出水杯的杯盖密封好,打开主机(右边的红色按钮)开关键,再进行面板的操作,进入H20程序(第一个),水雕焕肤强度调节钮在仪器后方的圆旋钮。以脸部排毒的手法进行操作。注:每次进水杯中的纯净水用完后,必须放掉上方出水杯中的纯净水,才能再次在进水杯中加入纯净水,以免出水杯中过满,水进入仪器内部,出水杯上方的导管,直接把导管拔出,把杯子取出将水倒出,倒出后把导管装回原位,一定要插紧(另外白色胶圈掂好,如没有胶圈就会出现漏气,没办法工作),以防漏气。(另:探头里面的海绵为一次性,做之前酒精浸泡,完成一个客户须及时清洗;皮肤问题比严重者可于纯净水杯里加几滴抗敏爽肤水及消炎精油,以免皮肤发炎;切记:出水杯中的水不可到全满再放水,须实时放掉,操作时间5-8分钟)操作注意事项:

如水雕焕肤头出现水循环中断,请注意以下几点:1)气压是否调节好;
2)检测上方出水杯是否密封好(1、胶圈是否没装上,2、杯子是否摔裂)
3)探头内部是否装入过滤海绵(探头上胶圈是否套好);4)进水杯是否水源充足;
导管是否完好无损,是否有堵塞

第3步:细胞透析头:首先使用细胞透析头,以四个载波触点接触皮肤,能量调到被护理人可以接受为适合档位,在作用于法令纹时,以一个触点先接触皮肤,再以四个触点接触肌肤并向上提升,操作完成后档位归零。操作时可引导被护理人观看视频显示,并针对问题性皮肤直行加强型的治疗,并可进行治疗前后肌肤对比。(半边面部护理时间为5分钟)

第4步:细胞置换头:启动该功能,把细胞置换头的建议强度调到5-7档,强度以个人承受力为标准,同时将产品进行导入安瓶内,主要作用在细胞内部的分子结构。探头的使用方法,把产品通过导入头可调节自动或手动的方式均匀扫在皮肤上,用提升的手法,在皮肤上按照肤质的纹理进行升。(操作时间为5到8分钟)

注:护理结束后用纯净水进行清洁此配件,以免产品干后形成堵塞。第5步:冰雕膜透:

水冷系统控制下瞬间达到0摄氏度,快速进行皮肤定型,并达到祛红抗敏、紧致塑形的效果(操作时间为5到8分钟)建议眼部护理:

第1步:水雕焕肤头:根据客人皮肤类型选择不同密度的水雕网面,左右两边杯进行75%酒精消毒,将左下方进水杯装入纯净水,右下方出水杯的杯盖密封好,打开主机(右边的红色按钮)开关键,再进行面板的操作,进入H20程序(第一个),水雕焕肤强度调节钮在仪器后方的圆旋钮。以眼部提升的手法进行操作。注:每次进水杯中的纯净水用完后,必须放掉上方出水杯中的纯净水,才能再次在进水杯中加入纯净,以免出水杯中过满,水进入仪器内部,出水杯上方的导管,直接把导管拔出,把杯子取出将水倒出,倒出后把导管装回原位,一定要插紧,以防漏气。(另:探头里面的海绵为一次性,做之前酒精浸泡,完成一个客户须及时清洗;皮肤问题比严重者可于纯净水杯里加几滴抗敏爽肤水及消炎精油,以免皮肤发炎;切记:出水杯中的水不可到全满再放水,须实时放掉,操作时间5分钟)

第2步:操作无痕魅眼头:启动该功能(微电和射频可以自主选择),能量调到被护理人可以接受的适合档位,在作用于法令纹时,触点接触肌肤向上提升。(操作时间5-8分钟)第3步:冰雕膜透:水冷系统控制下瞬间达到0摄氏度,快速进行眼部皮肤定型,并达到祛红抗敏、紧致塑形的效果。(操作时间为5到8分钟)五、水雕透析冰膜仪功能 a) 深层清洁,排毒; b) 去除多余的角质,垃圾;

c) 瘦脸,祛双下巴; d) 保湿活肤,全效修复; e) 提亮肤色,延缓衰老;

f) 收紧定型,抚平皱纹; g) 美颜焕肤,塑造年轻态。h) 六、适用人群 面部肌肤重整改善 1) 油性、毛孔粗大、角质层厚、净化皮肤、去除多余厚实的角质。毛孔净化,分解油脂,畅通及收紧毛孔,恢复明净柔滑的肌肤。

2) 肤色暗沉、疲倦、苍白、水肿、活氧肌肤,加速氧气吸收、改善回圈暗哑。3) 成熟型、松弛、缺水、皱纹、干燥、提升紧肤、收紧松弛肌肤、深层补充水分,刺激胶原蛋白的生成、更新肌肤、刺激细胞内膜、加速细胞的分裂再生,恢复年轻肌肤状态。