

前列腺热敷贴工厂 医保代理 oem

产品名称	前列腺热敷贴工厂 医保代理 oem
公司名称	临汾市御官方医药科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	侯马经济开发区锦茂工业园1号厂房3层
联系电话	13910611373

产品详情

【产品名称】前列腺热敷贴

【型号】 型； 型； 型； 型： 型： 型

【规格】 110mm × 80mm； 200mm × 90mm； 180mm × 80mm； 200mm × 130mm； 200mm × 80m

m

【结构及组成】该产品由无纺布、热熔胶、离型纸、磁片、发热袋（发热袋含有还原铁粉、活性炭、蛭石粉、盐、纯化水）组成。

【适用范围】该产品促进局部血液循环，辅助消炎、消肿。可用于慢性前列腺炎引起的尿频、尿急、尿

痛、尿不尽，下腹部、腰骶部、会阴部疼痛不适等症状的辅助治疗。

【产品性能】磁场强度为0.05T - 0.15T；40℃以上的持续时间 4h；*高温 60℃。

【使用方法】

1. 外用，打开产品包装袋，取出前列腺热敷贴，揭去离型纸，将磁体部分（产品正中）对准中极穴（肚脐下4寸）或命门穴（背后正对肚脐）的贴身（棉、麻）衣物上。
2. 每天1个穴位，交替贴敷，每贴使用4-6小时。
3. 使用时，如感觉温度过高，可揭掉温控贴离型纸，将温控贴粘面贴于产品正中。

【禁忌症】

1. 皮肤破损、开放性伤口处、溃烂、急性闭合性损伤禁用；恶性肿瘤、出血倾向疾病患者、装有心脏起搏器者、体内植入金属者禁用；严重的心、肝、肺、肾衰竭者禁用。
2. 糖尿病人、精神病人、认知障碍者、过敏体质者慎用；孕妇、儿童、体质极度虚弱者慎用；对磁疗有明显不良反应者慎用。

【注意事项】

1. 本品为一次性外用产品，开袋即热，不使用切勿开袋。
2. 对磁场敏感者如产生头晕、呕吐等晕磁现象，应立即停用，症状即可消失。
3. 用后患处出现不适或水泡，应暂停使用，防止感染，恢复后可继续使用。

4.温控贴为选用品，初次使用或在新的部位使用本品时，请依照自身对温度高低的要求，决定是否使用温控贴。

5.儿童需在成人监护下使用。

6.请勿在剧烈运动、睡眠中、取暖设备前使用，避免低温烫伤。

7.本品不能代替药品。

【储存方法】应储存在通风干燥、无腐蚀性气体的室内。

【运输】产品在运输过程中应避免日晒、雨淋及重压。

【有效期】二年

【生产批号/生产日期】见外包装

【配件清单】前列腺热敷贴、说明书、温控贴。

【生产许可证编号】晋食药监械生产许20160009号

【注册证编号】晋械注准20212090049

【产品技术要求编号】晋械注准20212090049

【注册人名称/生产企业】山西健康动力医疗科技有限公司

【注册人住所/生产企业住所】侯马开发区东区工业园锦茂标准厂房1号厂房3层

【生产地址】侯马开发区东区工业园锦茂标准厂房1号厂房3层、山西省临汾市曲沃县乐昌镇苏村东华街1号

【售后服务单位】

【售后服务电话】

请仔细阅读说明书并在医师指导下购买和使用