

诺福牌器械专用消毒剂

产品名称	诺福牌器械专用消毒剂
公司名称	深圳市润联环保科技有限公司郑州分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中原区航海西路与西三环交叉口向南100米路西中原贸易物流中心13排2号
联系电话	86-037155612745 13333847229

产品详情

【剂型、规格】

无色透明液体

1000ml/瓶

【主要有效成分及含量】

食品级过氧化氢；活性胶质银离子

【批准文号】

卫消进字（2007）第0023号

【产品特点】

1 高效杀灭芽孢及其他将近200种有害微生物（包括细菌，真菌，芽孢，部分病毒）

2 残留只有水和氧气

3 浸泡时间短于戊二醛

4 无色，无味，用后无需冲洗

5 无耐药性，有效避免二次污染

【使用方法范围】

类别	物品名称	消毒灭菌方法	备注
高危险性物品	金属器械	外科手术器械镊、剪、钳等，口腔科器械	按照1：7浓度稀释诺福产品，配成3%的溶液 浸泡5个小时
		心内针头、探针等	直接浸泡于诺福即用型杀菌剂中，15分钟
	橡硅胶类	各种插管、导管、引流条等	直接浸泡于诺福即用型杀菌剂中，15分钟
	玻璃类	玻璃器皿	浸泡于1：20比例稀释的诺福产品溶液后，压力蒸汽灭菌
	精密仪器	腹腔镜、关节镜、膀胱镜、宫腔镜、胸腔镜等	按照1：7浓度稀释诺福产品，配成3%的溶液 浸泡90分钟

	各类内镜活检钳	按照1：7浓度稀释诺福产品，配成3%的溶液 浸泡90分钟	按内镜规范操作
不锈钢类	弯盘、换药碗	500mg/L含诺福消毒液浸泡后，压力蒸汽灭菌	传染病用1000-2000mg/L1夜浸泡
塑料类	三通接头、各种导管等	直接浸泡于诺福即用型杀菌剂中，15分钟	
布衣	手术敷料等	压力蒸汽灭菌 直接浸泡于诺福即用型杀菌剂中，15分钟	

【注意事项】

- 1 请勿直接用皮肤接触浓缩产品，如不慎接触，请即刻用清水冲洗
- 2 外用消毒剂，不可口服
- 3 请勿直接接触眼睛
- 4 保持原厂包装

诺福销售经理兼技术工程师：张工

手机：13333847229 18937194330

QQ：2263726391

电话 : 0371-55612745

邮箱 : 2263726391@qq.com