

高血压穴位磁疗贴工厂 OEM 广审授权

产品名称	高血压穴位磁疗贴工厂 OEM 广审授权
公司名称	临汾市御官方医药科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	侯马经济开发区锦茂工业园1号厂房3层
联系电话	13910611373

产品详情

【产品名称】 穴位磁疗贴

【型号】 方型、圆型

【规格】 50mm × 70mm、60mm × 60mm、70mm × 70mm、70mm × 100mm、80mm × 110mm、90mm × 120mm、90mm × 130mm、90mm × 140mm、100mm × 120mm、120mm × 150mm，磁片直径 13mm；30mm、40mm、50mm、60mm、70mm、80mm、90mm、100mm，磁片直径 13mm。

【结构及组成】 该产品由无纺布、热熔胶、磁片、离型纸组成。

【适用范围】 对穴位进行磁疗，缓解血压升高引起的头痛、头晕、耳鸣等症状。

【产品性能】 磁场强度20mT - 200mT；持粘性不超过2.5mm，剥离强度应不低于1.0N/cm。

【使用方法】 使用前请清洁贴敷部位皮肤，沿缺口处撕开密封包装袋，取出产品，揭去离型纸，将贴片对准穴位（穴位请参照穴位图，如不能精准取穴，请在医护人员指导下使用），每贴使用6-12小时。建议贴敷部位为曲池、合谷、太冲、三阴交、涌泉。

【禁忌症】

- 1.金属异物局部、心脏起搏器局部及其邻近禁用；
- 2.严重的心、肝、肺、肾衰竭的患者禁用；
- 3.出血及有出血倾向者禁用；
- 4.孕妇下腹部禁用；
- 5.对磁疗有明显不良反应者禁用；
- 6.体质极度虚弱者禁用；
- 7.进入强磁场者禁用。

【注意事项】

- 1.使用前清洁贴敷部位。
- 2.请勿贴敷在皮肤过敏处。

3.若皮肤有不适感，请立即停止使用。

4.本品为外用一次性产品，请勿反复使用。

5.对磁场敏感者如产生头晕、呕吐等晕磁现象，应立即停用。

【储存方法】应贮存在通风干燥处，无腐蚀性气体的室内。

【运输】产品在运输过程中应避免日晒、雨淋及重压。

【有效期】二年

【生产日期/生产批号】见外包装

【配件清单】穴位磁疗贴、说明书、穴位图。

【生产许可证编号】晋食药监械生产许20160009号

【注册证编号】晋械注准20212200009

【产品技术要求编号】晋械注准20212200009

【注册人名称/生产企业】山西健康动力医疗科技有限公司

【注册人住所/生产企业住所】侯马开发区东区工业园锦茂标准厂房1号厂房3层

【生产地址】侯马开发区东区工业园锦茂标准厂房1号厂房3层、山西省临汾市曲沃县乐昌镇苏村东华街1号

【生产企业电话】 400-006-3721

【说明书修订日期】 2022年04月10日

【售后服务单位】

【售后服务电话】

请仔细阅读说明书并在医师指导下购买和使用

穴位磁疗贴穴位图

主穴：曲池、合谷、太冲、三阴交、涌泉。配穴：阴虚阳亢配太溪、肝俞；痰湿壅盛配中脘、丰隆；气虚血瘀配足三里、膈俞；阴阳两虚配关元、肾俞；心悸怔忡配内关、神门。

袋子内容：

【产品名称】穴位磁疗贴

【型号】方型、圆型

【规格】50mm×70mm、60mm×60mm、70mm×70mm、70mm×100mm、80mm×110mm、90mm×120mm、90mm×130mm、90mm×140mm、100mm×120mm、120mm×150mm，磁片直径 13mm；30mm、40mm、50mm、60mm、70mm、80mm、90mm、100mm，磁片直径 13mm。

【结构及组成】该产品由无纺布、热熔胶、磁片、离型纸组成。

【适用范围】对穴位进行磁疗，缓解血压升高引起的头痛、头晕、耳鸣等症状。

【有效期】二年

【生产日期/生产批号】见外包装

【生产许可证编号】晋食药监械生产许20160009号

【注册证编号】晋械注准20212200009

【产品技术要求编号】晋械注准20212200009

【注册人名称/生产企业】山西健康动力医疗科技有限公司

【注册人住所/生产企业住所】侯马开发区东区工业园锦茂标准厂房1号厂房3层

【生产地址】侯马开发区东区工业园锦茂标准厂房1号厂房3层、山西省临汾市曲沃县乐昌镇苏村东华街1号

【生产企业电话】

【售后服务单位】

【售后服务电话】

请仔细阅读说明书并在医师指导下购买和使用

其他内容详见说明书