

失眠贴厂家代理 OEM 广审授权

产品名称	失眠贴厂家代理 OEM 广审授权
公司名称	临汾市御官方医药科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	侯马经济开发区锦茂工业园1号厂房3层
联系电话	13910611373

产品详情

【产品名称】 穴位磁疗灸

【型号、规格】 圆形、方形

【尺寸】 30、40、50、60、50mm × 70mm、60mm × 60mm、70mm × 70mm、70mm × 100mm、80mm × 110mm、90mm × 120mm、90mm × 130mm、90mm × 140mm、100mm × 120mm、120mm × 150mm

【结构及组成】 该产品由无纺布、热熔胶、磁片、离型纸组成。

【适用范围】 适用于多梦易醒、醒后不眠、急躁易怒、神疲健忘等失眠引起的症状的辅助治疗。

【产品性能】 穴位磁疗灸利用磁场强度20mT - 200mT的磁体作用，贴敷于对应穴位，对穴位进行刺激。

【使用方法】

使用前请清洁贴敷部位皮肤，沿缺口处撕开密封包装袋，取出产品，揭去离型纸，将贴片对准穴位（穴位请参照穴位图，如不能精准取穴，请在医护人员指导下使用），每贴使用6-12小时。建议贴敷部位为安眠穴、中腕穴和内关穴。

【禁忌症】

- 1.金属异物局部、心脏起搏器局部及其邻近禁用；
- 2.严重的心、肝、肺、肾衰竭的患者禁用；
- 3.出血即有出血倾向者禁用；
- 4.孕妇下腹部禁用；
- 5.对磁疗有明显不良反应者禁用；
- 6.体质极度虚弱者禁用；
- 7.进入强磁场者禁用。

【注意事项】

- 1.使用前清洁贴敷部位。
- 2.请勿贴敷在皮肤过敏处。

3.若皮肤有不适感，请立即停止使用。

4.本品为外用一次性产品，请勿反复使用。

5.对磁场敏感者如产生头晕、呕吐等晕磁现象，应立即停用。

【储存方法】应贮存在通风干燥处，无腐蚀性气体的室内。

【运输】产品在运输过程中应避免日晒、雨淋及重压。

【有效期】二年

【生产日期/生产批号】见外包装

【配件清单】穴位磁疗灸、说明书、穴位图。

【生产许可证编号】晋食药监械生产许20160009号

【注册证编号】晋械注准20192200058

【产品技术要求编号】晋械注准20192200058

【注册人名称/生产企业】山西健康动力医疗科技有限公司

【注册人住所/生产企业住所】侯马开发区东区工业园锦茂标准厂房1号厂房3层

【生产地址】侯马开发区东区工业园锦茂标准厂房1号厂房3层、山西省临汾市曲沃县乐昌镇苏村东华街1号

【生产企业电话】 400-006-3721

【说明书修订日期】 2022年04月14日

【售后服务单位】

【售后服务电话】

请仔细阅读说明书并在医师指导下购买和使用

穴位磁疗灸穴位图

主穴：神门、内关、三阴交、足三里、安眠、心俞、印堂。心脾两虚者加脾俞；阴虚火旺者加太溪、太冲、涌泉；痰热内扰者加中脘、丰隆；胃腑不和者加中脘；肝火上扰者加太冲。