

# KFN-III中医定向透药用理疗电极片全国供货中

产品名称	KFN-III中医定向透药用理疗电极片全国供货中
公司名称	郑州克夫尼生物科技有限公司
价格	66.00/包
规格参数	品牌:全顺 型号:KFN-III 产地:中国河南郑州
公司地址	郑州高新区冬青街10号3号楼4层南4号
联系电话	15738316762 15738316762

## 产品详情

由导电硅胶层和其他辅料组成，主要搭配中医定向透药治疗仪用

7X10cm2贴/袋独立包装袋型号任意打 KFN-III用的较多

作用：传导电流，贴敷在作用部位。配合中低频、干扰

电、中医定向透药治疗仪、各种理疗、治疗等

各种电疗设备使用

郑州克夫尼生物科技有限公司位于郑州，主要生产理疗电极片和医用超声耦合贴片，

产品可以支持OEM/ODM

使用方法；

- 1、本产品为中医定向透药治疗仪、超声导入仪、脑循环治疗仪、经颅磁电疗仪、干扰电治疗等脉冲治疗仪以及其他带输出电极的理疗设备的配套使用产品

2、使用本品前，先清洁要粘贴的部位。

3、撕开包装袋将本品与中(低)频脉冲治疗仪的导线连接好，揭开

护胶片，将粘胶片直接粘贴于所需部位。粘贴电极时应轻轻按压要确保电极中心的压敏感导电胶紧贴皮肤，导电效果更佳。

4、打开机器开关，按治疗仪的说明书操作机器。使用完后先关掉开关，

再取下粘胶片。

5、本产品为一次性用品，严禁重复使用。

### 禁忌症

注意事项；孕妇、心脏安装起搏器者、皮肤破坏者禁用;对本品过敏者慎用。

### 注意事项、警示及提示性说明

1、电极使用时应与皮肤紧密、均匀接触;

2、治疗中电极应避免接触伤口及瘀痕;3治疗中电极不可置于心脏前后;

4、使用时偶有过敏现象发生，如使用部位出现瘙痒、皮疹、水泡，应停止使用。