

远红外风湿骨痛贴厂家代理 OEM 广审授权

产品名称	远红外风湿骨痛贴厂家代理 OEM 广审授权
公司名称	临汾市御官方医药科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	侯马经济开发区锦茂工业园1号厂房3层
联系电话	13910611373

产品详情

【产品名称】远红外磁疗贴

【型号、规格】50mm × 70mm、50mm × 80mm、60mm × 60mm、60mm × 80mm、70mm × 70mm、70mm × 100mm、75mm × 90mm、80mm × 100mm、80mm × 110mm、80mm × 120mm、80mm × 130mm、90mm × 120mm、90mm × 130mm、90mm × 140mm、95mm × 125mm、100mm × 130mm、100mm × 135mm、100mm × 150mm、110mm × 110mm、130mm × 130mm、150mm × 150mm；磁片直径（mm） 12.5 ± 2 ，厚度（mm） 2.2 ± 0.5 。

【结构及组成】该产品由无纺布、热熔胶、离型纸、磁片、远红外陶瓷粉组成。

【适用范围】适用于颈椎病、腰椎间盘突出、风湿性关节炎、肩周炎引起疼痛的辅助治疗。

【产品性能】在 $4 \mu\text{m}$ - $16 \mu\text{m}$ 波长范围内的远红外法向发射率不低于0.80，磁片表面的磁场强度应在20mT

- 100mT范围内，持粘性不超过2.5mm，剥离强度应不低于1.0N/cm。

【使用方法】使用前请清洁贴敷部位皮肤，沿缺口处撕开包装袋，取出产品，揭去离型纸，将贴片对准患处，每贴使用6-12小时。

【禁忌症】

1. **皮肤**破损或过敏、高热患者、孕妇禁用。
2. 装有心脏起搏器者、出血倾向性疾病患者、感染者禁用。

【注意事项】

1. 本品为一次性外用产品，不得重复使用。
2. 用后患处出现不适，应暂停使用，防止感染，不适症状消失后可继续使用。
3. 儿童须在成人的监护下使用。
4. 对磁场敏感者如产生头晕、呕吐等晕磁现象，应立即停用。
5. 急性损伤后请在24小时后使用。

【储存方法】应贮存在通风干燥处，无腐蚀性气体的室内。

【运输】产品在运输过程中应避免日晒、雨淋及重压。

【有效期】三年

【生产日期/生产批号】见外包装

【配件清单】远红外磁疗贴、说明书。

【生产许可证编号】晋食药监械生产许20160009号

【注册证编号】晋械注准20182200013

【产品技术要求编号】晋械注准20182200013

【注册人名称/生产企业】山西健康动力医疗科技有限公司

【注册人住所/生产企业住所】侯马开发区东区工业园锦茂标准厂房1号厂房3层

【生产地址】侯马开发区东区工业园锦茂标准厂房1号厂房3层、山西省临汾市曲沃县乐昌镇苏村东华街1号

【生产企业电话】

【说明书修订日期】

【售后服务单位】

【售后服务电话】

请仔细阅读说明书并在医师指导下购买和使用