

鸡传染性法氏囊病毒检测试纸条

产品名称	鸡传染性法氏囊病毒检测试纸条
公司名称	苏州艾瑞德生物科技有限公司
价格	.00/盒
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区东吴北路31号吴中科技园B幢201室
联系电话	0512-68796311 15850166981

产品详情

【原理】

法氏囊病毒检测卡以双抗体夹心法为基础，采用免疫层析金标记技术，快速检测法氏囊病毒。

【试剂组成】

1. 法氏囊病毒快速检测卡 20套/40套
2. 样本稀释液 20套/40套
3. 棉签 20套/40套
4. 样本稀释液 20套/40套
5. 一次性手套 5只

【操作方法】

一、样品制备：

1. 用棉签从发病初期的病禽口中取呼吸道分泌物。
2. 对全身症状较严重的病例取血清，或取脾脏组织破碎液。
3. 接种过疫苗的禽发生感染时，采集样品的时间应推迟6-14天。

二、操作步骤：

1. 打开样本收集试管，插入棉签。
2. 充分搅动棉签直至棉签上的样本溶入稀释液，然后丢弃棉签。

3. 从包装盒里拿出测试卡，平放在干燥的平台上。

4.

当振荡、混匀后，垂直收集管，取上清液并滴加2至3滴上清液（约100~120 μ l）到检测卡中的样品孔中。

5. 5分钟时判断结果，10分钟后无效。

【结果判定】

1. 阳性：在观察孔内，若对照线显色，检测线同时显色，判为阳性。

2. 阴性：在观察孔内，若对照线显色，而检测线不显色，判为阴性。

3. 无效：在观察孔内，若对照线不显色，则结果无效，请重新测试。

【检测方法的局限性】

1. 检测线红色线条的颜色深浅直接与检测物质多少相关。当检测物质含量很高时，检测线可能在出现后，红色又慢慢变淡，此时建议将样品数倍稀释后再进行检测，红色线条就可以稳定了。

2. 当检测线出现模糊的色迹，但不显示为清楚的线形时，判为阴性。

3. 本试剂是定性筛选试剂，一个明确的临床诊断结果应该由医生在考虑到所有的临床和实验室的现象后作出。

【注意事项】

1. 本品如果购买时发现过期、破损、污染、无效的产品，请在购买处进行更换。

2. 测试样品来自动物，可能有潜在感染性，样品和使用过的试剂应被看作微生物危险品处理。

3. 所有检测卡启封后马上使用，此前不要随意打开。

4. 本品为一次性产品，请勿二次使用；请勿使用非本品随附的稀释液。

【储存及有效期】

1. 保存于干燥阴凉处（2~30℃），有效期为18个月，生产日期见包装。

2. 打开包装后，1小时内使用。