

猪细小抗原快速检测试卡

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 猪细小抗原快速检测试卡 |
| 公司名称 | 苏州艾瑞德生物科技有限公司 |
| 价格 | .00/盒 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州市吴中区东吴北路31号吴中科技园B幢201室 |
| 联系电话 | 0512-68796311 15850166981 |

产品详情

【产品用途】

猪细小病毒抗体检测试剂盒(胶体金法),系采用国际最先进的胶体金免疫层析技术检测样本(全血、血清、血浆)中抗猪细小病毒抗体的方法。整个试验只需20分钟,操作简便、快速、准确,灵敏度高、结果直观、容易判定。

【操作步骤】

1. 打开包装袋,取出测试卡平放在桌面上,并做好标记;
2. 在检测卡的加样孔内加入2-3滴待检血液、血浆或血清样品;
3. 在15分钟内观察和记录结果。

【结果判定】

阴性 : 只在对照区(C)出现一条紫红色线。

阳性 : 在检测区(T)和对照区(C)各出现一条紫红色线。

无效: 都不出现紫红色线或只在检测区(T)出现紫红色线,而对照区(C)不出现紫红色线。

【试验方法的局限性】

本检测卡只对猪血液、血浆或血清样品中猪细小病毒抗原进行定性检测，用于猪细小病毒诊断时应结合其他症状和检测结果。

【注意事项】

1. 请严格按照说明书要求进行操作和结果判定。
2. 检测样品可以是猪血液、血清或血浆。
3. 检测卡从铝箔袋取出后应尽快使用，尽量避免长时间放置在空气中，否则吸潮后将失效。
4. 检测环境应保持一定的湿度，避风和避免在过高温度下进行操作。
5. 检测卡在室温下保存，如在2-8℃冷藏，使用时需平衡至室温后方可打开包装进行检测操作。
6. 为防止弱阳性样品的漏检，应在加样后3-15分钟最终判读结果，在检测线出现紫红线，既可判断为阳性结果。超过15分钟的结果只能作为参考。

【包装规格】 单头份铝箔袋包装（内含检测卡、吸管和干燥剂）；50头份/盒

【贮藏和有效期】 3-30℃，避光干燥处贮存，有效期12-18个月。