

# 新华灭菌测试包BP1321-生物制药专用上海德拉

产品名称	新华灭菌测试包BP1321-生物制药专用上海德拉
公司名称	上海德拉电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海浦东新区金豫路100号3号楼1106室
联系电话	021-68974449 13002117150

## 产品详情

### 新华牌压力蒸汽灭菌化学测试包

#### 使用说明书

##### 一、产品说明

本品是由卡纸、压力蒸汽灭菌爬行式指示卡、皱纹纸和标签纸组成的化学测试包。用于121℃、20min或132℃、3min压力蒸汽灭菌时，灭菌完毕后，若测试包内的化学指示卡（爬行式）的指示物爬行到灭菌合格区，表示灭菌主要参数（温度、时间、蒸汽饱和度）达到要求；指示物未爬到灭菌合格区，表示未达到要求。

##### 二、使用范围

适用于121℃、20min和132℃、3min压力蒸汽灭菌效果的批量监测。

##### 三、使用方法

1、将测试包贴有标签的一面朝上，平放在灭菌器排气口上方，且保证测试包不受其它物品。

##### 挤压

2、按照灭菌器厂家使用说明书进行灭菌操作。

3、灭菌结束后取出测试包。检查测试包标签上的化学指示剂，如果指示剂由黄色变为

灰色或黑色，表示该测试包已暴露于饱和蒸汽中。

4、待测试包冷却后，打开测试包取出新华牌压力蒸汽爬行式化学指示卡进行阅读。

#### 结果判定

合格；黑色指示物爬行到灭菌合格区，表示灭菌主要参数均达到要求。

不合格：黑色指示物未爬行到灭菌合格区，表示灭菌参数中至少有一个参数没有达到要求。

#### 四、注意事项

1、测试包标签上的化学指示剂颜色的变化仅显示该测试包是否使用过。如果化学指示剂不变色，请检查灭菌程序和灭菌器保证灭菌循环的正常运行。

2、本品为一次性物品，不得反复使用。

3、储存于15 -30 和干燥环境（相对湿度小于60%），避光（包括太阳光，荧光灯以及紫外线消毒灯光）。

4、本品只可用于压力蒸汽灭菌效果的批量监测，不能用于干热、低温、化学气体灭菌监测。

#### 五、包装规格：30包 / 箱