

医用犬伤创口冲洗机

产品名称	医用犬伤创口冲洗机
公司名称	武汉康德庆生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	耗材:专用弱碱性冲洗液 加热功能:自带加热 打印:冲洗完成自带打印冲洗凭证
公司地址	武汉东湖开发区高新大道858号生物医药产业园6 A-1栋（自贸区武汉片区）
联系电话	18530855281 18530855281

产品详情

医用犬伤创口冲洗机采用脉动压力技术，使用特制刀头，采用无菌包装的弱碱性皮肤黏膜消毒液，通过自动化控制程序全自动完成高标准的犬伤冲洗处置。犬伤专用伤口清创机科学的处置能有效减低伤患创口病毒数量，极大提升狂犬病预防有效性；以完全符合国家规定的处置程序有效保障犬伤门诊的权益，规避医疗风险，避免医疗纠纷；专业的冲洗清创设备可显著降低对门诊处置水平要求，减轻处置人员的工作负担。

动物抓咬伤后，给我们造成了严重的伤害。

清洗、消除皮肤及伤口上的狂犬病毒，让我们避免第二次伤害，远离恐惧与风险！

犬伤创口清洗消毒液

适用于被动物抓、咬伤及被舔伤口等部位清洗与消毒（包括狂犬病毒的冲洗与消毒）

《狂犬病暴露预防处置工作规范》（2009年）

第七条伤口处理包括底冲洗和消毒处理。局部伤口处理越早越好。

伤口冲洗:用20%的肥皂水(或者其他弱碱性清洁剂)和一定压力的流动清水交替彻底清洗、冲洗所有咬伤和抓伤处至少15分钟。然后用生理盐水(也可用清水代替)将伤口洗净，zui后用无菌脱脂棉将伤口处残留液吸尽，避免在伤口处残留肥皂水或者清洁剂。较深伤口冲洗时，用注射器或者高压脉冲器械伸入伤口深部进行灌注清洗，做到全面彻底。

《狂犬病预防控制技术指南》中疾控传防发(2016)10号

暴露后处置有两个主要目标，一是预防狂犬病的发生，二是预防伤口发生继发细菌感染，促进伤口愈合和功能恢复。

伤口冲洗：用肥皂水(或其他弱碱性清洗剂)和一定压力的流动清水交替清洗咬伤和抓伤的每处伤口至少15分钟。如条件允许，建议使用狂犬病专业清洗设备和专用清洗剂对伤口内部进行冲洗。最后用生理盐水冲洗伤口以避免肥皂液或其他清洗残留。

犬伤清洗流程:清水——专用清洗液——生理盐水

犬伤创口清洗消毒液

(即犬动物咬伤清洗消毒液)清洗、消毒二合一，适用于被犬、猫等宠物抓咬伤后的皮肤创面狂犬病毒的清洗和消毒，使用方便。

宠物抓咬犬伤创口清洗消毒液

能灭活狂犬病毒

降低狂犬病发病几率

杀灭伤口常见致病菌

防止感染，促进伤口愈合

对人体安全无毒、无刺激作用