

YN-H一次性滑移垫医护人员好助手

产品名称	YN-H一次性滑移垫医护人员好助手
公司名称	济南盈诺医用设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市颖秀路2766号留学人员创业园北楼741
联系电话	027-85865859 18560167037

产品详情

盈诺医疗作为全国唯一一家定位于手术室、外科辅助器材的专业制造商，一直专注于病人转移方案的研究，经过多年不懈的努力，试验改进了上百种材质和方案，生产出“ yn-h型一次性滑移垫 ”一种一次性病人转移耗材，以其独特简易的工作原理，巧妙的实现了病人随时随地轻松转移，其科学实用独特的临床价值，创造性的解决了医护界的常见困扰，是国内病人转移方案的开创者和领导者。

产品介绍

yn-h一次性滑移垫可以帮助医护人员解决以下难题：

1.不再费神费力：

滑移垫仅需1-2人即可将病人过床，代替原来需4-5人才能完成的工作，省力省时，可以大大减轻医护人员劳动强度。 2. “病人不动式”过床：

骨折、手术后病人因为病痛或术后带有引流管等，往往不能搬动或触碰，一次性滑移垫与中单或床单配合使用，拉动中单或床单将病人过床，类似传送带转移物品，传送带一直转动，但放在上面物品是保持不动的，病人完全不被搬动或触碰，即可平稳安全地被转移。 3.有效避免二次损伤：

以往的搬运方法，采用多人在不同的部位、不同的用力大小抬送，病人极易感到不适，甚至还会因为搬运的不恰当方式导致病人损伤，滑移垫能让病人整体过床，避免二次损伤，实现轻松舒适整体转移。另外，有支撑力的垫板能起到保护病人的骨骼以及在车/床/台之间转移时可能发生的硌伤、拉伤等。4. 可以广泛使用：

滑移垫可在有一定高度差的情况下使用，故可广泛用于医院各科室手术台/病床/推车/ct台/x线检查台之间过床。

适用范围：该一次性滑移垫耗材适用于手术室/急诊/icu/病房/ct室/x线室/康复室等科室，医护人员将病人在手术台/病床/推车/ct台/x线检查台之间过床，以及康复或重病人护理中，病人被移位/侧身/清洁等。

产品组成：

本产品由一次性滑动布套与垫板组成的滑移垫、一次性中单、吸水垫构成；滑移垫既可单独使用，也可与一次性中单（床单）配合使用。

工作原理：

该一次性滑移垫耗材利用两种不同特殊材料之间的滑动性，在外力的推动下，形成类似传动带的效果，病人好像在一条传动带上似的被过床，使原来费时耗力的过床变得轻松容易。滑移垫与一次性中单（床单）配合使用，更能省力，并且将病人整体过床，减少二次损失，特别适用于骨折、肥胖、麻醉后病人等。

特点：轻便：重量为2.6kg，并可折叠 透x光：放射检查时不必抽出

规格参数：170x50cm(可根据用户要求定制)