

自动梅花针组合产品治疗近视眼专用

产品名称	自动梅花针组合产品治疗近视眼专用
公司名称	北京博裕堂工科贸有限公司
价格	2600.00/套
规格参数	
公司地址	北京海淀魏公村
联系电话	010-56219857 18911378223

产品详情

产品描述： 一款家庭用中医保健治疗器械，采用微电脑控制，纯模拟人工治疗技法，在不伤及皮肤的前提下，叩刺人体一定的部位，通过络脉调理，对内、外、妇、儿、皮肤、五官各科很多病症均有效果。尤其是配合外用中药，对青少年近视、弱视、远视、散光以及成人干眼症等有显著疗效。

操作须知： 1、使用前须用75%酒精棉球对治疗部位进行消毒（消毒棉球自备）；
2、将针头向上放置，打开储药器塞盖，将配套的专用的药液灌入储药器，按动三个滚珠，使转动顺畅；
3、接通电源； 4、将“开关”按钮按下，即可开始治疗操作。“力度”按钮按下为“强”，按钮弹起为“弱”，“频率”按钮按下为“快”，按钮弹起为“慢”；
5、弹起“开关”按钮停止治疗，拔掉电源。 6、治疗过程中要始终保持治疗部位的药液处于湿润状态，如遇出药不畅，可先停止梅花针叩刺，用力涂抹，待药液供给充足后再进行叩刺。

使用注意事项： 1、急性传染病、皮肤烫伤、孕妇和皮肤溃疡患者禁用此器械治疗。 2、5岁以下的婴幼儿，体弱多病以及初次使用梅花针治疗者的前10次治疗，应把频率调节至低档，力度调节至弱档。即弹起“力度”及“频率”按钮。 3、严禁药液通过针头中间的针孔渗透到器械内部，损伤电器元件；灌注药液后，使用或放置时针头始终都向下方向。 4、使用过程中，滚珠式的药液涂抹方式会导致储药器内形成真空，影响出药。遇到此类问题时，请将针头向上，用手按动三个滚珠。 5、使用结束后，应及时拔掉电源，将剩下的药液倒出，用清水冲洗储药器并将滚珠及出针孔擦拭干净。出药部位因生锈及药液粘稠会导致出药不畅或针头工作受阻。 6、本品使用的药液为专用药液，严禁灌装非本品专用药液。

主要技术参数： 使用药液成分：处方药，红花、冰片、密蒙花等二十几味纯中草药秘制而成，为青少年近视、弱视、远视、散光及成人干眼症等专用药液。

药液规格：90支包装，每支容积3毫升； 使用量：每支一次/天使用量，3个月为一个疗程。

针头：采用选用gb/t424 0不锈钢丝中的0cr18mi9，针面直径为11mm；针尖长度为3.5mm；电源：3c认证产品，输入电压交流220伏，输出电压：直流12伏。