

专用医用雾化器|鼎鼎船超声波雾化器加湿器品牌

产品名称	专用医用雾化器 鼎鼎船超声波雾化器加湿器品牌
公司名称	河南邦拓医疗器械有限公司
价格	458.00/台
规格参数	
公司地址	洛阳市涧西区南昌路创展国际贵都2-1807
联系电话	86-37964383269 15516383539

产品详情

进口鼎鼎船雾化器/超声波雾化器加湿器/家用医用雾化器加湿器

欢迎咨询：155 1638 3539

一、鼎鼎船雾化器产品特点：1、出雾量大、雾粒小、使用寿命长，自由拉伸压缩送雾管（晶片和主电路板等部件采用接插件式连接，方便更换和维修调试，并配置巡诊包式外包装）。2、保健呼吸道、增强人体免疫力、清洁肺部有害物质、软化毛孔、清除死皮细胞和污垢、快速补水、保持肌肤光洁细腻。3、一机多能，更适合家庭使用。

二、鼎鼎船雾化器产品相关信息：

【产品简介】超声雾化器能将水溶剂药物雾化成极微小的雾粒，作为病人气雾吸入治疗或表面病灶喷药治疗，对鼻炎、咽炎、急慢性支气管炎、肺气肿、哮喘、肺部或皮肤感染等有显著疗效，是国内外医院内外科、儿科、五官科、皮肤科以及养老院等单位必备的医疗设备。【主要材料】塑料

【工作原理】通过超声波振荡，将水药溶剂物雾化成极其微小的雾粒，病人以气雾吸入。

1先将大雾化杯 对准白色机箱体上 ，使大雾化杯下端的最大卡头对准白色机箱体正前方卡槽，顺时针转动大雾化杯，然后将注入药液的小雾化杯放入大雾化杯内。若装药液量>150ml，可用大雾化杯放药液，但先要旋下大雾化杯内的大螺纹盖，装入大震荡膜，大密封圈放置于大震荡膜之上，再将大螺纹盖旋紧在大雾化杯底部，试验不渗水后再装到水槽上，灌入药液。插入大雾化杯上盖，使进风口对准风门“ ” 标记。连接好送雾管或喷嘴。

2用喷嘴必须加接防返流接管，防止患者在呼气时，将雾化的药液倒灌机内易损坏机器。

4、将电源插头插入220V交流电插座内。

5、开机工作

1打开电源开关，运行指示灯亮，风机工作，（如水槽内水位过低或没加水，此时水位指示黄灯不亮，请关机加水）。

2控制旋钮，风量调节旋钮至自定要求（雾量控制、风量调节旋钮最佳设置：雾量控制旋钮至最大，风量调节旋钮旋至大小变化段的中间位置，此时雾浓，药液利用率高。如要求送雾快、雾化量大，可加大风量）并把喷嘴接至病人。（根据需要可使用定时器）

3若雾化的药液量少，请调小雾量和风量旋钮至送出薄雾即可，或请遵医嘱。

4药液雾化完后，向上取出大雾化杯上盖，取雾化杯时，应防止水滴入风道口。

5无药液和无水时应及时关机，连续工作超过4小时应更换水槽中的水，否则会损坏机器。

6、使用后整理

关机后取下大雾化杯，将本机头部倾斜倒出水槽内的水，并擦净水槽和晶片（防止氧化和积垢，否则将影响晶片寿命），若连续使用可不到水，但一天工作完应将水槽内水到净。

三、鼎鼎船雾化器产品参数：1、电源电压：AC220V ± 10%，50Hz ± 1Hz 2、消化功效：50VA
3、超声频率：1.7MHz ± 10% 4、连续工作时间：4小时 5、消耗功率：50W
6、小雾化杯最大装药量：150mL 7、大雾化杯最大装药量：350mL 8、最大雾化率：3mL/min
9、定时范围：0 ~ 60min无级可调 10、净重：1.8kg 11、内包装尺寸：270 × 200 × 240mm

【装箱清单】主机：1台；咬嘴2只；波纹管1根；防反流接管1只

鼎鼎船集团有限公司

大陆子公司·河南邦拓医疗器械有限公司

现诚招鼎鼎船产品各地区独家代理商

招商：155 1638 3539

主营产品：鼎鼎船家用制氧机、鼎鼎船空气消毒机、鼎鼎船电子血压计、鼎鼎船雾化器等。