

狂犬病创口自动冲洗机 犬伤清创机

产品名称	狂犬病创口自动冲洗机 犬伤清创机
公司名称	武汉康德庆生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	耗材:专用弱碱性冲洗液 加热功能:自带加热 打印:冲洗完成自带打印冲洗凭证
公司地址	武汉东湖开发区高新大道858号生物医药产业园6 A-1栋（自贸区武汉片区）
联系电话	18530855281 18530855281

产品详情

狂犬病创口自动冲洗机 犬伤清创机是标准化犬伤处置门诊必备伤口冲洗设备，以狂犬病伤口暴露处置规范和狂犬病伤口暴露处置指南为标准，狂犬病暴露预防处置门诊——犬伤冲洗机完全满足规范要求：利用一定压力清水和弱碱性皮肤黏膜冲洗消毒剂交替冲洗15分钟，zui后用生理盐水冲洗伤口，避免其它冲洗剂残留。

狂犬病创口自动冲洗机 犬伤清创机、犬伤门诊专用伤口冲洗机是用于被狗咬伤后进行正规的伤口处理，对伤口进行彻底冲洗、消毒，严重的伤口还要到医院进科处理，局部伤口处理越早越好。如清洗或消毒时疼痛剧烈可先给予局部麻醉，然后再进行处理。

动物咬伤可导致从小伤口到较大且复杂的伤口，如划伤、穿刺伤、撕裂伤等多种损伤。

由于动物的咬合力以及撕扯力，所致的咬伤伤口即便表面看起来并不引人注目，也可能并发严重的神经、血管、韧带、肌腱甚至骨骼损伤，评估伤口并不简单，需要格外注意。

动物咬伤伤口的伤口如何处理？

伤口处理的目的在于预防感染，促进伤口恢复。主要方式为冲洗伤口表面细菌、消毒和换药。清创由内

到外，保证伤口内没有残留失活组织异物，有疑问的需要 48 ~ 72 h 再次清创。

冲洗液的选择：用肥皂水（或其他弱碱性清洗剂）和流动清水交替清洗所有咬伤处 15 min，然后用无菌纱布或脱脂棉将伤口处残留液吸尽，zui后用生理盐水冲洗伤口。

自来水用于简单划伤，新鲜动物咬伤。效果等同于生理盐水。生理盐水等渗、对组织毒性小，不影响伤口愈合。

杀菌剂对组织产生毒性，影响组织愈合。过氧化氢溶液因有气体栓塞、心跳骤停等风险，不推荐常规使用。

冲洗压力：低压冲洗是指压力 4-15PSI，高压冲洗是指冲洗压力高于 20 PSI。

高压冲洗用于伤口的炎症阶段，去除坏死组织、碎片和残留；低压冲洗用于伤口的增生阶段，避免损伤和/或妨碍上皮细胞生长。