

理疗电极片（中低频、超声导药、定向透药一次性耗材）

产品名称	理疗电极片（中低频、超声导药、定向透药一次性耗材）
公司名称	郑州大鲸医疗科技有限公司
价格	35800.00/件
规格参数	品牌:迈通 型号:DJ-VII 产地:河南
公司地址	郑州市高新技术产业开发区冬青路10号1号楼4层4号
联系电话	15093291270 15093291270

产品详情

名称-理疗电极片

电极片简介-理疗电极片采用对人体无毒无害的凝胶材料或无纺布材料制成。电极片具有一定的柔韧性，可以较服贴地和人体皮肤接触；为了保证电流通路，电极片有一面是导电层。治疗时，必须将电极片导电层朝向皮肤，使治疗仪的输出电流顺利到达皮肤，才能达到治疗作用。

使用方法

1. 使用前请清洁皮肤表面，除去表面污垢、汗渍和粉尘。
2. 将电极片与治疗仪导线正确连接，揭去电极片保护膜，粘贴于治疗部位，即可开机进行常规治疗。

3.

每次治疗结束后，请先关机再拨下导线插头、揭下电极片、贴上保护膜、妥善保存，以备下次再用。

4. 电极片一般使用寿命为10—20次。（产品的使用寿命与皮肤特性和使用方法有关）

5. 请密封放置在阴凉处保存。

注意事项

1. 使用前或使用中如有问题，建议向医生咨询。

2. 请勿用酒精清洁皮肤，酒精清洁后会给皮肤造成较大阻抗，影响效果。

3. 除非要立即使用，否则请勿拆开包装。

4. 电极片为单个病人专用，使用时无需清洁和消毒。

5. 电极片有脏污时应与皮肤紧密、均匀接触。

6. 治疗中电极应避免接触伤口及疤痕。

7. 出现皮肤过敏、刺激现象，应及时停止使用。

适用症状

颈椎病，腰间盘突出，腰肌劳损，滑膜炎，骨刺，骨质增生，坐骨神经痛，关节炎，风湿，肩周炎等。

禁忌症

皮肤有炎症或溃烂的患者禁止使用。心脏内放有金属支架的患者禁止使用乳腺电极片。

维护保养

尽量不要让贴片接触到含有油脂的东西，也不要水洗，这样都会降低贴片的粘性。使用完后要将保护纸贴会，然后放到电极片的密封袋里封装，储存于阴凉干燥处。

该产品应储存于阴凉干燥处。