

兴优医用射线防护喷剂的正确使用方法

产品名称	兴优医用射线防护喷剂的正确使用方法
公司名称	河南省兴优医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	尉氏县新尉工业园区优德大道1号
联系电话	18039570161 18039570161

产品详情

如何正确使用兴优医用射线防护喷剂

- (1) 在使用之前，将兴优医用射线防护喷剂B瓶液体倒入A瓶冻干粉中晃动均匀，使得喷头与皮肤垂直。
- (2) 用温水或植物萃取液清洁放疗区域的皮肤，然后用柔软的毛巾轻轻擦干。
- (3) 将喷头对准待保护的皮肤，并轻轻喷洒。
- (4) 轻轻按摩注射区域皮肤，使得兴优医用射线防护喷剂能够渗透到皮肤内部。
- (5) 使用兴优医用射线防护喷剂时，应避免喷洒到眼睛部位。