

# 高级多功能护理急救训练模拟人

产品名称	高级多功能护理急救训练模拟人
公司名称	上海中弘科教设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区中辰路225号-11
联系电话	021-64049756 13661681239

## 产品详情

### 产品介绍:

该产品高级多功能护理急救训练模拟人（心肺复苏、男女导尿功能）是集国外同类产品之长处及公司科技人员的共同努力2013年款最新开发研制的高级多功能护理急救训练模拟人。模型包含以往心肺复苏急救功能外还另增加了基础护理技能功能的两种组合为一体。其核心模块由全身人体模型，cpr控制器组成，提供了一个多功能实用的培训工具。是目前国内较先进、功能齐全、材料讲究的全新高级多功能护理急救训练模拟人。产品功能特点介绍:心肺复苏操作：

执行标准：美国心脏学会(aha)2010国际心肺复苏(cpr) & 心血管急救(ecc)新指南标准。

功能介绍：模拟标准气道开放；人工手位胸外按压时：1、动态条码指示灯显示按压深度：按压深度正确(5-6cm区域)由条码绿灯显示、按压深度不够（小于5cm）由条码黄色

、按压深度过深（大于6cm）由条码红色指示灯移动的动态反馈显示cpr按压深度。（错误按压偏上、下、左、右多有指示灯光及语音报警提示）2、液晶计数显示；详细记录按压错误的具体原因（按压力量过大、按压力量过小、按压位置不对及正确的次数）。

3、语言提示：中文语音提示，详细提示按压错误的具体原因，以便训练者及时改正。

人工口对口呼吸(吹气)时：1、动态条码指示灯显示潮气量：吹入的潮气量正确（500ml~600ml-1000ml）由条码绿灯显示吹入的潮气量过小或过大分别由条码黄色或条码红色指示灯移动动态反馈显示潮气度；

2、液晶计数显示：详细记录吹气错误的具体原因（按吹气量过大、吹气力量过小、及吹气正确的次数）

3、语言提示：中文语音提示，详细提示吹气错误的具体原因，以便训练者及时改正。

按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人）

操作周期：先有效胸外按压30次再有效2次人工吹气，30：2五个循环周期cpr操作。

操作频率：最新国际标准：至少100次/分。

操作方式：训练操作；考核操作(专业考核、普及考核)。

操作时间：以秒为单位计时。

语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。

成绩打印：操作结果可热敏打印成绩单。模拟人生命体征变化：初始状态时，模拟人瞳孔散大颈动脉无搏动，按压过程中颈动脉被动搏动搏动频率与按压频率一致，抢救成功后模拟人瞳孔恢复正常颈动脉自主搏动。电源状态：采用220v电源，经过稳压器稳压输出电源24v。基础护理操作：

股外侧肌注射 灌肠法 女性导尿术 男性导尿术 女性膀胱冲洗 男性膀胱冲洗

臀部肌肉注射 整体护理：擦洗、穿换衣服

产品名称：高级多功能护理急救训练模拟人（心肺复苏、男女导尿功能） 型号：zh/cpr480s