

冷藏箱12L，疫苗冷藏箱，样本接收箱，医疗废物转运箱

产品名称	冷藏箱12L，疫苗冷藏箱，样本接收箱，医疗废物转运箱
公司名称	厦门齐冰冷链科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市思明区文屏路73-16
联系电话	0592-5817050 13799283637

产品详情

冷藏箱规格参数

型号：冷藏箱QBLL0812

制作工艺：全压合成注塑工艺外层均采用PP硬制塑料

箱体材质：外层均采用PP硬制塑料,内层采用的ABS食用塑料注塑而成

保温层：聚氨酯无氟发泡（PU发泡），隔热层厚度 45mm

特色：内置托盘，可防止器械。内置隔板，有效隔绝冷藏物品与冰源的直接接触。

保冷时间：
环境温度43℃下，箱内液态温度2~8℃，冷藏时间 48小时；增加冰源可使时间增加到72小时。

规格：内部容积 12L

外部尺寸 420x245x300mm，内部尺寸 335x170x240mm

箱体自重：2.8KG

箱体承重：冷藏箱箱体承重 100公斤以上，连接件拉力 60公斤以上；

牢固等级：冷藏箱箱体 级，连接件 级；

冰源配置：6个3*9*16CM冰排

冰源材料：聚乙烯 高效冷源，牢固结实，安全。

冷冻特点：在冷冻成固体时，冰排最大厚度不超过未冻结时厚度的15%

齐冰冷藏箱使用方法：

1、使用冷藏箱前仔细检查箱体是否有破损，破洞，扣具是否损坏，确保冷藏箱，血液运输箱的密封性完好。

- 2、取出箱内配置的冰盒，注水至标示的注水线处。
- 3、将冰盒分开、平整放入冷冻库，适当预留空间（因冰盒冷冻后体积会略有膨胀），使冰盒充分冷冻至坚硬（约10-12小时）；冷冻时间视冷冻室的冷冻能力为准。
- 4、产品使用时，将充分冷冻的冰盒从电冰箱中取出，然后逐个将冰盒放入便携冷藏箱内或反辐射内袋；
- 5、包内冰盒数量可灵活调整，以便满足不同客户对温度和空间的不同要求。
- 6、将冰盒固定好，再往包内放入需冷藏或冰冻的物品、饮料等，最后盖上便携冷藏箱即可。
- 7、使用一段时间后，当箱内的温度高于8 时，请将已经结冻的冰盒替换成完全冰冻的冰盒。
- 8、冬天，即使除去内袋和冰盒，冷藏箱具有非常好的保温效果。

注意事项：

- 1、使用完冷藏箱后，仅需要用干布轻轻擦拭箱体即可。请妥善保管冷藏箱，以便再次使用。
- 2、使用前请检查冷源的完好。轻拿轻放冷源。如遇冷源破裂，请更换新的冷源。