

灸疗贴工厂代理 oem 广审授权

产品名称	灸疗贴工厂代理 oem 广审授权
公司名称	临汾市御官方医药科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	侯马经济开发区锦茂工业园1号厂房3层
联系电话	13910611373

产品详情

灸疗贴说明书

【产品名称】灸疗贴

【型号、规格】200.0mm × 86.0mm、198.0mm × 89.0mm、195.0mm × 90.0mm、

100.0mm × 85.0mm、180.0mm × 110.0mm、130.0mm × 100.0mm

【结构及组成】该产品由无纺布、远红外布、医用胶、离型纸、磁片、内袋（含有还原铁粉、活性炭、蛭石粉、医用树脂、盐、水）及外袋（PE薄膜）组成。

【适用范围】该产品适用于软组织损伤、风湿性关节炎、骨性关节炎、创伤性关节炎、颈椎病、腰肌劳损、肩周炎、腰部软组织损伤、痛经、宫寒、产后温经暖宫的辅助治疗。

【产品性能】远红外波长范围在4 μ m -16 μ m之间的法向发射率不低于0.80。磁场强度为50mT - 150mT，持粘性不超过2.5mm，剥离强度应不低于1.0N/cm。升温时间 20min；温度保证时间 持续时间的50%；40 以上的持续时间 4h；*高温46 ±5 。

【使用方法】

使用时，撕开内袋，取出灸疗贴，展开护翼并揭去内侧离型纸，贴在相应疼痛部位，轻压周边胶布贴实，8-12小时后取下。

【禁忌症】

装有心脏起搏器、出血倾向疾病患者、感染者、孕妇禁用；对磁疗有明显不良反应者慎用。

【注意事项】

- 1.本品为一次性外用产品，开袋即热，不使用切勿开袋。
- 2.对磁场敏感者如产生头晕、呕吐等晕磁现象，应立即停用，症状即可消失。
- 3.用后患处出现不适或水泡，应暂停使用，防止感染，恢复后可继续使用。
- 4.温控贴为选用品，初次使用或在新的部位使用本品时，请依照自身对温度高低的要求，决定是否使用温控贴。
- 5.儿童须在成人监护下使用。
- 6.请勿在剧烈运动、睡眠中、取暖设备前使用，避免低温烫伤。
- 7.过敏体质慎用。

【储存方法】应贮存在通风干燥处，无腐蚀性气体和通风良好的室内。

【运输】产品在运输过程中应避免日晒、雨淋及重压。

【配件清单】灸疗贴、说明书、温控贴。

【有效期】二年

【生产日期/生产批号】见外包装

【生产许可证编号】晋食药监械生产许20160009号

【注册证编号】晋械注准20172090031

【产品技术要求编号】晋械注准20172090031

【注册人名称/生产企业】山西健康动力医疗科技有限公司

【注册人住所/生产企业住所】侯马开发区东区工业园锦茂标准厂房1号厂房3层

【生产地址】侯马开发区东区工业园锦茂标准厂房1号厂房3层、山西省临汾市曲沃县乐昌镇苏村东华街1号

【生产企业电话】

【说明书修订日期】2022年4月24日

【售后服务单位】

【售后服务电话】

请仔细阅读说明书并在医师指导下购买和使用

袋子内容：

100.0mm × 85.0mm、180.0mm × 110.0mm、130.0mm × 100.0mm

【适用范围】该产品适用于软组织损伤、风湿性关节炎、骨性关节炎、创伤性关节炎、颈椎病、腰肌劳损、肩周炎、腰部软组织损伤、痛经、宫寒、产后温经暖宫的辅助治疗。

【生产日期/生产批号】见外包装

【生产许可证编号】晋食药监械生产许20160009号

【注册证编号】晋械注准20172090031

【产品技术要求编号】晋械注准20172090031

【注册人名称/生产企业】山西健康动力医疗科技有限公司

【注册人住所/生产企业住所】侯马开发区东区工业园锦茂标准厂房1号厂房3层

【生产地址】侯马开发区东区工业园锦茂标准厂房1号厂房3层、山西省临汾市曲沃县乐昌镇苏村东华街1号

【生产企业电话】

【售后服务单位】

【售后服务电话】

请仔细阅读说明书并在医师指导下购买和使用

其他内容详见说明书

盒子内容：

【产品名称】灸疗贴

【型号、规格】200.0mm × 86.0mm、198.0mm × 89.0mm、195.0mm × 90.0mm、

100.0mm × 85.0mm、180.0mm × 110.0mm、130.0mm × 100.0mm

【结构及组成】该产品由无纺布、远红外布、医用胶、离型纸、磁片、内袋（含有还原铁粉、活性炭、蛭石粉、医用树脂、盐、水）及外袋（PE薄膜）组成。

【适用范围】该产品适用于软组织损伤、风湿性关节炎、骨性关节炎、创伤性关节炎、颈椎病、腰肌劳损、肩周炎、腰部软组织损伤、痛经、宫寒、产后温经暖宫的辅助治疗。

【有效期】二年

【储存方法】应贮存在通风干燥处，无腐蚀性气体和通风良好的室内。

【生产许可证编号】晋食药监械生产许20160009号

【注册证编号】晋械注准20172090031

【产品技术要求编号】晋械注准20172090031

【注册人名称/生产企业】山西健康动力医疗科技有限公司

【注册人住所/生产企业住所】侯马开发区东区工业园锦茂标准厂房1号厂房3层

【生产地址】侯马开发区东区工业园锦茂标准厂房1号厂房3层、山西省临汾市曲沃县乐昌镇苏村东华街1号

【生产企业电话】

【售后服务单位】

【售后服务电话】

请仔细阅读说明书并在医师指导下购买和使用

其他内容详见说明书

【生产批号】

【生产日期】

【有效期至】

灸疗贴厂家代理OEM广审授权

临汾市御官方医药科技有限公司，作为一家灸疗贴厂家，致力于为广大消费者提供高质量、安全可靠的灸疗贴产品。我们拥有先进的生产设备和生产团队，为客户提供灸疗贴的代理和OEM服务，并且具备广审授权资质。

风湿骨痛是常见的疾病，给患者带来极大的痛苦。灸疗贴是一种传统中医疗法，通过燃烧艾草等天然材

料，使热能渗透到患部深处，达到温通经络、活血化瘀的作用，从而缓解疼痛。在治疗风湿骨痛方面，灸疗贴被广大患者所接受，并取得了良好的效果。

除了风湿骨痛，灸疗贴还适用于其他疾病，比如痛经、宫寒、关节炎、腰肌劳损和软组织损伤等。痛经是女性常见的生理现象，常常伴随着腹痛和腰酸。灸疗贴可以通过温热的刺激，改善子宫血液循环，缓解经期疼痛。宫寒是女性常见的病症，使用灸疗贴可以温暖子宫，缓解宫寒引起的不适。关节炎是关节结构损伤或退变引起的疾病，灸疗贴可以通过温通经络、舒筋活血的作用，减轻关节炎带来的疼痛和不适。腰肌劳损和软组织损伤常常是劳累过度或不当运动导致的，使用灸疗贴可以加速血液循环和代谢，促进损伤部位的康复。

作为一家灸疗贴厂家，我们的产品质量在同行中具有一定的竞争力。我们生产的灸疗贴采用优质的艾草和含有天然草本精华的材料，无任何刺激性香精和防腐剂，对人体无副作用。我们严格遵循国家相关标准，通过了广审授权认证，保证了产品的质量和可靠性。

关于灸疗贴的使用，以下是一些常见的问题和解答

问 灸疗贴能够治愈风湿骨痛吗

答 灸疗贴可以缓解风湿骨痛，但具体效果因人而异。在使用过程中，注意控制烧灸的时间和温度，适当加强锻炼，加速血液循环，有助于治疗风湿骨痛。

问 灸疗贴使用时需要注意什么

答 在使用灸疗贴之前，清洁患部，并保持肌肤干燥。使用时，将灸疗贴贴在患部，点燃一端，等待温热感渗透到患处。控制好烧灸时间和温度，避免烫伤。

问 灸疗贴适合什么人群

答 灸疗贴适合有风湿骨痛、痛经、宫寒、关节炎、腰肌劳损和软组织损伤等疾病的人群。但对于孕妇、皮肤破损或伤口的患者，以及过敏体质的人群，应慎重使用。

综上所述，灸疗贴作为一种传统中医疗法，在治疗风湿骨痛、痛经、宫寒、关节炎、腰肌劳损和软组织损伤等方面具有一定的疗效。如果您对灸疗贴的代理、OEM服务感兴趣，请联系临汾市御官方医药科技有限公司，我们将竭诚为您提供优质的产品和服务。