

# 医用超声耦合贴片可配合超声透药治疗仪使用

产品名称	医用超声耦合贴片可配合超声透药治疗仪使用
公司名称	河南三乐医疗器械有限公司
价格	20.00/袋
规格参数	三乐:规格：45*45 型号：TT:规格：60*60
公司地址	郑州市金水区紫荆山路16号紫金城写字楼14层1409号
联系电话	13523489688

## 产品详情

超声“药物导入”(靶向给药)治疗的方法步骤

配制药液:根据不同疾病治疗需要,组合用药。

撕开贴片上的粘贴纸层,贴片平放在台面上,将注射器中的药液平均注射到二片中。

将贴片粘贴在需要治疗的部位。

将治疗头对准后用固定带或胶带固定在贴片上(如在治疗头上均匀涂抹少量耦合剂

按启动键开始治疗,期间如需调节不同强度,需按暂停键,调节后再重新按启动键,倒计时30分钟后自动停止。

治疗结束后,取下治疗声头.(若治疗头上有耦合剂,一定要用柔软纸巾擦干净,以免腐蚀治疗头)。