

A型肉毒毒素快速检测试剂(胶体金法)

产品名称	A型肉毒毒素快速检测试剂(胶体金法)
公司名称	深圳市恒昊生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区吓榨新村一巷8号405 (注册地址)
联系电话	17318069187

产品详情

A型肉毒毒素快速检测试剂(胶体金法)

试验方法:

1.对不同来源的标本,制备样品检测液。

1)食品:固态食品如肉类、豆制品、牌制的菜、酱等如是动物可取饲料,称取约2克,充分剪碎加5ml生理盐水振荡10分钟,使内容物充分自然沉降后取上清0.3ml作为样品检测液;液态食品如峰案、乳液等吸取0.1ml加生理水0.4ml均后作为样品检测液(2)环境污染物:取疑肉毒毒素污染的土壤、灰尘或物体表面、动物皮毛的擦拭子,浸于1ml生理盐水,自然沉降后或晾干擦拭子,取上清0.3ml作为样品检测液;或取疑似污染水0.3ml作为样品检测液

(3)标本取少量疑似肉毒者粪便和物,充分碎加5ml生理盐水振荡10分钟,使内容物充分浸出,自然沉降后取上清0.3ml作为样品检测液;或取疑似肉毒者血清0.1ml,加生理盐水0.4ml,混均后作为样品检测液。2,取试剂一个撕开外包装,吸取样品检测液滴加3-4滴(约0.2ml)于试剂圆孔中,2分钟后开始观察结果,15分钟终止观察。

A型肉毒毒素快速检测试剂(胶体金法)结果的解释、产品性能指标:阳性结果:试剂窗口" c "和" T " (对照和检测)处出现2条红色沉淀线为阳性,即有肉毒毒素检出。 阴性结果:试剂窗口" c " (对照)处出现1条红色沉淀线为阴性,即无肉毒毒素检出。 试剂失效:试剂窗口" c " " T " (对照和检测)均无红色沉淀线.即试剂失效