

# 眼部按摩仪，眼保姆眼部按摩器，眼睛按摩仪

产品名称	眼部按摩仪，眼保姆眼部按摩器，眼睛按摩仪
公司名称	深圳信达康电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井松福大道马安山蓝天科技园A2栋3楼
联系电话	86-075523322191 13430604001

## 产品详情

品名：信达康眼部按摩仪

型号：bk901

产品介绍：

1.预防近视,美容眼部：每天三次，每次三至五分钟，有效改善组织的微循环，提高睫状肌的调节能力，激活眼部细胞组织，增氧气通络，有效改善视力，预防近视，美容眼部、明目凝神。2.消除眼疲劳，缓解眼睛和大脑疲劳：每次闭目戴三至五分钟，可使眼球击眼肌充分放松，降低眼内压迅速消除用眼过度的酸胀、肿痛，干涩。3.消除黑眼圈、眼袋，减少眼部细纹：每天坚持使用五至十分钟，即可帮助消除由于睡眠不足和血液循环不畅形成的眼袋及黑眼圈加强眼部细胞的新陈代谢，抚平眼角皱纹使眼角的肌肤更加光泽富有弹性。4.抑制神经衰弱，改善睡眠：磁场有良好的镇静作用，每晚睡前戴用五至十分钟，充分松弛脑神经，易于进入深度睡眠消除用脑过度及神经衰弱引起的失眠症，并可缩短入睡时间。

包装参数：

外形尺寸：长230mm × 宽105mm × 高105 mm 手控器：长158mm × 宽66 mm × 高43 mm

单台包装尺寸：长250mm × 宽80 mm × 高250mm 单台重量：0.92kg

外包装尺寸：长520mm × 宽420 mm × 高520mm 装箱率：20台/箱 整箱重量：19.4kg

## 操作说明：

1. 开机定时功能：按住on/time/off键2秒开机，然后短按为5/10/15分钟倒计时循环选择；按住on/time/off键2秒关机；
2. 按摩眼睛功能：中心按键为按摩模式键；气压模式，红外线热敷模式，振动模式，按模式键，可以独立任意一种模式按摩眼睛或任意2种模式一起按摩眼睛或3种模式同时按摩眼睛；当你选择到3种按摩功能中的任意一种或2种或3种按摩功能时，连续按相对应的功能按键，则可以改变各对应功能的模式；如：显示屏上有气压图标，则按气压按键，可以改变气压充放气模式；十种不同频率振动功能，四种气压模式（自动、一段、二段、三段充气模式），两种远红外线热敷功能（30 -42 ）。
3. 音乐功能：开机自动打开音乐，按音乐键，可以循环选择内置的3种音乐；当按住2秒音乐键时，则关闭音乐功能，再短按时又打开音乐；内置三种放松音乐，外配耳机（可调音量大小）。