

# 脉动负压纤体仪葫芦岛丰胸仪大石桥美体仪庄河BIO美容美体仪海

产品名称	脉动负压纤体仪葫芦岛丰胸仪大石桥美体仪庄河BIO美容美体仪海
公司名称	丹意达美容美体有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市风雨坛路138号
联系电话	024-22961717 15840461568

## 产品详情

产品名称：脉动负压纤体仪(新品)

产品编号：DYT-802

仪器功能： 美体减肥、瘦身、雕塑体形； 消除橘皮样病变、消除身体组织代谢积滞现象、排毒；改善静脉血液循环，强化组织代谢功能，有效改善肤质； 缓解肌肉紧张、酸痛；  
全身抗衰老(一次见效，无效退款)

仪器原理：脉动负压纤体仪是丹意达美容仪器公司最新研发和生产的一种美体减肥仪器，此仪器是集合40KHz强声波碎脂，5MHz射频溶脂及-0.09MPa真空负压吸脂为一体，有效针对各种问题性肥胖及因衰老引起的皮肤问题。40KHz强声波：由于脂肪组织密度低，细胞间黏合力较弱，强生波在脂肪细胞间产生空化效应，强大的冲击力会导致脂肪细胞的爆破，细胞间剧烈的相互做用，使脂肪细胞温度骤然上升，加速其溶解过程。5MHz射频：以最先进的射频技术，直达深层脂肪层，靶向定位输出射频能，使脂肪细胞组织在快速活跃的状态下，产生细胞体的热能，使局部温度升高，通过汗腺及淋巴将体内的多余脂肪及毒素排出体外，以达到溶解脂肪的功效。同时射频能刺激深层胶原蛋白再生，重组，使肌肤恢复紧致细腻。  
-0.09MPa负压：利用真空负压吸力，对身体各组织进

行提、按、拉等仿生按摩，促进血液及淋巴循环，通经活络，排毒养颜。注意事项：

- 1、在使用此仪器前，请务必仔细阅读以下内容：
- 2、儿童，孕妇，以及皮肤病、静脉曲张、癌症、艾滋病、血液性疾病、精神类疾病等患者禁止使用
- 3、此仪器禁止使用在身体淤青、创口以及痣，眼睛，口腔，喉部，耳朵，乳头，性器官等部位
- 4、长期服用抗生素、抗凝剂、抗组胺等药物，接受整形、抽脂手术后以及心脏病患者请在医师的指导下使用此仪器
- 5、使用此仪器时，请按照操作说明设定不同程序并使用相应手法在治疗部位移动，切不可在某个部位停留时间过久。
- 6、请遵医嘱定期使用此仪器。治疗效果会因年龄、体质、生活方式不同有所差别。
- 7、请勿拆解此仪器，或试图进行说明书中未加以说明的操作。所有的维修工作必须由本公司指定或认可的专业维修人员进行。
- 8、请在使用后拔开电源线，以免发生危险。
- 9、请勿将任何类型的物体或液体插入或渐入仪器。如有上述情况发生，请立即切断电源并与我公司联系。
- 10、为延长机器的使用寿命，开关机间隔请在1分钟以上。
- 11、使用电源应和本机标注的电源规格相符，否则可能使仪器不正常工作甚至烧毁

丹意达（中国 沈阳）美容仪器减肥仪器丰胸仪器设备有限公司 （一次的合作

永远的朋友！）丹意达（中国.沈阳）美容美体仪器设备有限公司

丹意达（中国.郑州）美容美体仪器设备有限公司 丹意达（中国.南京）美容美体仪器设备有限公司  
丹意达（中国.重庆）美容美体仪器设备有限公司 丹意达（中国.西安）美容美体仪器设备有限公司  
丹意达（中国.成都）美容美体仪器设备有限公司 丹意达（中国.广州）美容美体仪器设备有限公司  
丹意达（中国.北京）美容美体仪器设备有限公司 丹意达（中国.上海）美容美体仪器设备有限公司  
丹意达（中国.湖南）美容美体仪器设备有限公司 丹意达（中国.石家庄）美容美体仪器设备有限公司  
丹意达（中国.青岛）美容美体仪器设备有限公司

长期供应:丹意达沈阳美容仪器|本溪减肥仪器|黑龙江丰胸仪器|无影刀武汉|气血透析仪赤峰|大庆冰电波RF拉皮|吉林爆脂仪|大连爆脂机|丹东减肥机|长春无针电美塑|牡丹江红外线乳腺检测仪|赤峰纤体美胸一体仪|宽甸丰胸机|辽阳丰胸仪|伊春减肥仪|七台河减肥设备|阜新美容设备|绥化丰胸设备|延吉家用减肥仪器|鸡西家用美容仪器|哈尔滨家用丰胸仪器|抚顺远红外线瘦身毯|朝阳远红外线溶脂毯|盘锦皮肤测试仪|锦州振脂机|四平远红外线瘦身太空舱|鞍山远红外线溶脂灯|奈曼排毒仪|松源多功能纤体舱|齐齐哈尔虹膜仪|鹤岗多功能美容仪器|白山祛皱美容笔|通辽注氧仪|瓦房店塑身仪|白城瘦身仪器|葫芦岛太空舱|铁岭美容仪器|营口美容美体仪器|等系列美容美体仪器。