

# 聚焦能量美体仪葫芦岛丰胸仪大石桥美体仪庄河BIO美容美体仪海

产品名称	聚焦能量美体仪葫芦岛丰胸仪大石桥美体仪庄河BIO美容美体仪海
公司名称	丹意达美容美体有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市风雨坛路138号
联系电话	024-22961717 15840461568

## 产品详情

产品名称：聚焦能量美体仪

产品编号：DYT-902

仪器功能：美体减肥、美体瘦身、雕塑体形；消除橘皮样病变、瘦身消减脂肪团；排毒、紧肤、舒筋活血、缓解肌肉紧张、酸痛；全身抗衰老；对修复妊娠纹有很好的疗效。仪器原理：聚焦能量美体仪是丹意达美容仪器厂最新研制与开发的一款融合了50K聚焦强声波，RF双极、三极射频，真空吸附和BIO+冷光4大核心技术为一体的高科技纤体美容仪器，此仪器不但技术超前，而且效果显著，一次见效，外观精美，深受美容院机大型整形医院的赞扬与好评，并得到了院长的热烈推荐。

建议护理步骤: 1、治疗前，先把产品涂抹到皮肤上，如腹部、臀部、大腿、面部。

先把电源线及配件插到相对应接头上，打开电源开关。仪器进入待机状态。2、第一步：点击“BODY”进入身体雕塑系统，操作50K强声波爆脂头(用于身体)，设定好工作时间（约10到15分钟），选择好所需的强度及模式，强度以客户承受力度为准，模式以客户舒适度为宜。点击“START”键进入工作状态。操作完后。把强度归零。即可进入下一步操作。3、第二步：操作真空光纤吸脂头(作用于身体)，设定好工作时间（大约10到15分钟），选择好所需的强度及模式，强度以客户承受力度为准，模式以客户舒适度为宜。点击“START”键进入工作状态。操作完毕后。把强度归零。即可进入下一步操作。4、第三步：操作三极射频头(作用于身体)，设定好工作时间（大约10到15分钟），选择好所需的强度，强度以客户承受力度为准。点击“START”键进入工作状态。操作完毕后。把强度归零。点击“BACK“返回首页，即可进入下一步操作。5、第四步：点击“FACE”进入面部雕塑系统，操作BIO+冷光头（作用于眼部）设定好工作时间（大约5到8分钟），选择好所需的强度及模式，强度以客户承受力度为准，模式以客户舒适度为宜。点击“START”键进入工作状态。操作完毕后。把强度归零。即可进入下一步操作。6、第五步：操作双极射频头（作用于面部）设定好工作时间（大约5到8分钟），选择好所需的强度，强度以客户承受力度为准。点击“START”键进入工作状态。操作完毕后。把强度归零。操作完毕。

丹意达（中国 沈阳）美容仪器减肥仪器丰胸仪器设备有限公司（一次的合作

永远的朋友！）丹意达（中国.沈阳）美容美体仪器设备有限公司

丹意达（中国.郑州）美容美体仪器设备有限公司 丹意达（中国.南京）美容美体仪器设备有限公司

丹意达（中国.重庆）美容美体仪器设备有限公司 丹意达（中国.西安）美容美体仪器设备有限公司

丹意达（中国.成都）美容美体仪器设备有限公司 丹意达（中国.广州）美容美体仪器设备有限公司

丹意达（中国.北京）美容美体仪器设备有限公司 丹意达（中国.上海）美容美体仪器设备有限公司  
丹意达（中国.湖南）美容美体仪器设备有限公司 丹意达（中国.石家庄）美容美体仪器设备有限公司  
丹意达（中国.青岛）美容美体仪器设备有限公司

长期供应:丹意达沈阳美容仪器|本溪减肥仪器|黑龙江丰胸仪器|无影刀武汉|气血透析仪赤峰|大庆冰电  
波RF拉皮|吉林爆脂仪|大连爆脂机|丹东减肥机|长春无针电美塑|牡丹江红外线乳腺检测仪|赤峰纤体美  
胸一体仪|宽甸丰胸机|辽阳丰胸仪|伊春减肥仪|七台河减肥设备|阜新美容设备|绥化丰胸设备|延吉家用  
减肥仪器|鸡西家用美容仪器|哈尔滨家用丰胸仪器|抚顺远红外线瘦身毯|朝阳远红外线溶脂毯|盘锦皮肤  
测试仪|锦州振脂机|四平远红外线瘦身太空舱|鞍山远红外线溶脂灯|奈曼排毒仪|松源多功能纤体舱|齐  
齐哈尔虹膜仪|鹤岗多功能美容仪器|白山祛皱美容笔|通辽注氧仪|瓦房店塑身仪|白城瘦身仪器|葫芦岛  
太空舱|铁岭美容仪器|营口美容美体仪器|等系列美容美体仪器。