

医用口腔防蛀膏

产品名称	医用口腔防蛀膏
公司名称	临汾市御官方医药科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	侯马经济开发区锦茂工业园1号厂房3层
联系电话	13910611373

产品详情

【产品名称】 医用口腔防蛀膏

【型号】 儿童型

【规格】 10g/支、20g/支、30g/支、50g/支、70g/支、100g/支、110g/支、120g/支、140g/支、150g/支、160g/支、180g/支、200g/支。

【结构及组成】 本产品由氟化钠、甘油、柠檬酸锌、卡波姆、山梨糖醇、羧甲基纤维素、二氧化硅、十二烷基硫酸钠、苯氧乙醇、矫味剂、低聚异麦芽糖、纯化水组成，包装为聚乙烯/铝/聚乙烯复合软管。

【适用范围】 本产品用于预防龋齿，封闭牙齿窝沟点隙，阻断细菌进入，提高牙齿釉质的耐酸性。

【产品性能】 pH值范围为5.5 ~ 8.5；重金属含量（以Pb计）应小于20g/g；砷含量应小于5g/g。细菌菌落总数（cfu/g） 500,霉菌和酵母菌总数（cfu/g） 100,大肠埃希菌（1g）、金黄色葡萄球菌（1g）、铜绿假单胞菌（1g）不得检出。

【使用方法】

3-6岁儿童：取本品涂于患处保持3-5分钟或用牙刷蘸取本品刷洗3-5分钟，后用清水漱口。每次用量0.12-0.15g（绿豆大小），每日2次。

6岁以上儿童：取本品涂于患处保持3-5分钟或用牙刷蘸取本品刷洗3-5分钟，后用清水漱口。每次用量0.25-0.3g（豌豆大小），每日2次。

【禁忌症】

- 1.对柠檬酸锌过敏者、对本品其他成分过敏者禁用。
- 2.严重肝肾功能不全者禁用。
- 3.孕妇禁用。
- 4.3岁以下儿童禁用

【注意事项】

- 1.本品为外用品，禁止内服，不使用切勿打开。
- 2.置于儿童不易触及到的地方。
- 3.患有牙龈溃疡或口腔炎慎用。
- 4.切勿接触眼睛，如接触眼睛，请用大量清水冲洗。
- 5.请勿吞食，如被吞食，请用大量清水漱口，并喝大量清水，及时就医。
- 6.如用后患处感觉不适，应暂停使用，症状消失后可以继续使用。
- 7.本品性状发生改变时禁止使用。
- 8.儿童必须在成人监护下使用。
- 9.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。
- 10.使用前请阅读说明书，在产品有效期内使用，超过有效期禁止使用。
- 11.使用前确认包装是否完整，如遇破损，切勿使用。
- 12.本品极少发生过敏反应，一旦出现过敏反应，应停用本品。
- 13.产品应在专业医师指导下使用。
- 14.请在30天内用完，并且每次使用后拧紧盖子。

【储存方法】应贮存在通风干燥处，无腐蚀性气体和通风良好的室内。

【运输】产品在运输过程中应避免日晒、雨淋及重压。

【配件清单】医用口腔防蛀膏、说明书。

【有效期】二年

【生产日期/生产批号】见外包装

【医疗器械生产许可证编号】晋药监械生产许20200012号

【医疗器械注册证编号】晋械注准20232170060

【医疗器械产品技术要求编号】晋械注准20232170060

【注册人名称/生产企业】山西健康之路医疗器械有限公司

【注册人住所/生产企业住所】侯马经济开发区科技创新孵化园标准厂房1栋厂房

【生产地址】侯马经济开发区科技创新孵化园标准厂房1栋厂房，曲沃县乐昌镇苏村东华街1号

【生产企业电话】400-187-0607

【说明书编制日期】2023年05月12日

【售后服务单位】山西健康之路医疗器械有限公司

【售后服务电话】400-187-0607

请仔细阅读产品说明书或在医务人员指导下购买和使用

【产品名称】医用口腔防蛀膏

【型号】成人型

【适用范围】本产品用于预防龋齿，封闭牙齿窝沟点隙，阻断细菌进入，提高牙齿釉质的耐酸性。

【使用方法】

取本品涂于患处保持3-5分钟或用牙刷蘸取本品刷洗3-5分钟，后用清水漱口。每次用量1-1.25g（约1cm长），每日2次。

【禁忌症】

- 1.对柠檬酸锌过敏者、对本品其他成分过敏者禁用。
- 2.严重肝肾功能不全者禁用。
- 3.孕妇禁用。
- 4.3岁以下儿童禁用

【注意事项】

- 1.本品为外用品，禁止内服，不使用切勿打开。
- 2.置于儿童不易触及到的地方。
- 3.患有牙龈溃疡或口腔炎慎用。
- 4.切勿接触眼睛，如接触眼睛，请用大量清水冲洗。
- 5.请勿吞食，如被吞食，请用大量清水漱口，并喝大量清水，及时就医。
- 6.如用后患处感觉不适，应暂停使用，症状消失后可以继续使用。
- 7.本品性状发生改变时禁止使用。
- 8.儿童必须在成人监护下使用。
- 9.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。
- 10.使用前请阅读说明书，在产品有效期内使用，超过有效期禁止使用。
- 11.使用前确认包装是否完整，如遇破损，切勿使用。
- 12.本品极少发生过敏反应，一旦出现过敏反应，应停用本品。
- 13.产品应在专业医师指导下使用。
- 14.请在30天内用完，并且每次使用后拧紧盖子。

【储存方法】应贮存在通风干燥处，无腐蚀性气体和通风良好的室内。

【运输】产品在运输过程中应避免日晒、雨淋及重压。

【配件清单】医用口腔防蛀膏、说明书。

【有效期】二年

【生产日期/生产批号】见外包装

【医疗器械生产许可证编号】晋药监械生产许20200012号

【医疗器械注册证编号】晋械注准20232170060

【医疗器械产品技术要求编号】晋械注准20232170060

【注册人名称/生产企业】山西健康之路医疗器械有限公司

【注册人住所/生产企业住所】侯马经济开发区科技创新孵化园标准厂房1栋厂房

【生产地址】侯马经济开发区科技创新孵化园标准厂房1栋厂房，曲沃县乐昌镇苏村东华街1号

【生产企业电话】400-187-0607

【说明书编制日期】2023年05月12日

【售后服务单位】山西健康之路医疗器械有限公司

【售后服务电话】400-187-0607

请仔细阅读产品说明书或在医务人员指导下购买和使用