

# 已通牙齿脱敏膏工厂 OEM 广审授权

产品名称	已通牙齿脱敏膏工厂 OEM 广审授权
公司名称	临汾市御官方医药科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	侯马经济开发区锦茂工业园1号厂房3层
联系电话	13910611373

## 产品详情

【产品名称】医用牙齿脱敏膏

【型号】成人型

【规格】10g/支、20g/支、30g/支、50g/支、70g/支、100g/支、110g/支、120g/支、140g/支、150g/支、160g/支、180g/支、200g/支。

【结构及组成】本产品由氟化钠、甘油、柠檬酸锌、卡波姆、山梨糖醇、羧甲基纤维素、二氧化硅、十二烷基硫酸钠、苯氧乙醇、矫味剂、低聚异麦芽糖、纯化水组成，包装为聚乙烯/铝/聚乙烯复合软管。

【适用范围】本产品用于消除暴露的牙颈部的过敏症状，减轻和预防因牙本质敏感引起的牙齿过敏症状。

。

### 【产品性能】

pH值范围为5.5 ~ 8.5；重金属含量（以Pb计）应小于20g/g；砷含量应小于5g/g；细菌菌落总数（cfu/g）100,霉菌和酵母菌总数（cfu/g）10,大肠埃希菌（1g）、金黄色葡萄球菌（1g）、铜绿假单胞菌（1g）不得检出。

### 【使用方法】

取本品涂于患处保持3-5分钟或用牙刷蘸取本品刷洗3-5分钟，用清水漱口。每次用量1-1.25g（约1cm长），每日2次。

### 【禁忌症】

- 1.对氟化钠、柠檬酸锌过敏者、对本品其他成分过敏者禁用。
- 2.严重肝肾功能不全者禁用。
- 3.孕妇禁用。
- 4.3岁以下儿童禁用。

### 【注意事项】

- 1.本品为外用品，禁止内服，不使用切勿打开。
- 2.置于儿童不易触及到的地方。
- 3.患有牙龈溃疡或口腔炎慎用。

- 4.切勿接触眼睛，如接触眼睛，请用大量清水冲洗。
- 5.请勿吞食，如被吞食，请用大量清水漱口，并喝大量清水，及时就医。
- 6.如用后患处感觉不适，应暂停使用，症状消失后可以继续使用。
- 7.本品性状发生改变时禁止使用。
- 8.儿童必须在成人监护下使用。
- 9.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。
- 10.使用前请阅读说明书，在产品有效期内使用，超过有效期禁止使用。
- 11.使用前确认包装是否完整，如遇破损，切勿使用。
- 12.本品极少发生过敏反应，一旦出现过敏反应，应停用本品。
- 13.产品应在专业医师指导下使用。
- 14.请在30天内用完，并且每次使用后拧紧盖子。

**【储存方法】**应贮存在通风干燥处，无腐蚀性气体和通风良好的室内。

**【运输】**产品在运输过程中应避免日晒、雨淋及重压。

**【配件清单】**医用牙齿脱敏膏、说明书。

【有效期】 二年

【生产日期/生产批号】 见外包装

【生产许可证编号】 晋药监械生产许20200012号

【注册证编号】 晋械注准20232170061

【产品技术要求编号】 晋械注准20232170061

【注册人名称/生产企业】 山西健康之路医疗器械有限公司

【注册人住所/生产企业住所】 侯马经济开发区科技创新孵化园标准厂房1栋厂房

【生产地址】 侯马经济开发区科技创新孵化园标准厂房1栋厂房，曲沃县乐昌镇苏村东华街1号

【生产企业电话】

【售后服务单位】

【售后服务电话】

【说明书编制日期】 2023年05月18日

请仔细阅读产品说明书并在医务人员指导下购买和使用

**【产品名称】** 医用牙齿脱敏膏

**【型号】** 成人型

**【适用范围】** 本产品用于消除暴露的牙颈部的过敏症状，减轻和预防因牙本质敏感引起的牙齿过敏症状。

**【产品性能】**

**【使用方法】**

**【禁忌症】**

- 1.对氟化钠、柠檬酸锌过敏者、对本品其他成分过敏者禁用。
- 2.严重肝肾功能不全者禁用。
- 3.孕妇禁用。
- 4.3岁以下儿童禁用。

**【注意事项】**

- 1.本品为外用品，禁止内服，不使用切勿打开。
- 2.置于儿童不易触及到的地方。
- 3.患有牙龈溃疡或口腔炎慎用。

- 4.切勿接触眼睛，如接触眼睛，请用大量清水冲洗。
- 5.请勿吞食，如被吞食，请用大量清水漱口，并喝大量清水，及时就医。
- 6.如用后患处感觉不适，应暂停使用，症状消失后可以继续使用。
- 7.本品性状发生改变时禁止使用。
- 8.儿童必须在成人监护下使用。
- 9.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。
- 10.使用前请阅读说明书，在产品有效期内使用，超过有效期禁止使用。
- 11.使用前确认包装是否完整，如遇破损，切勿使用。
- 12.本品极少发生过敏反应，一旦出现过敏反应，应停用本品。
- 13.产品应在专业医师指导下使用。
- 14.请在30天内用完，并且每次使用后拧紧盖子。

**【储存方法】**应贮存在通风干燥处，无腐蚀性气体和通风良好的室内。

**【运输】**产品在运输过程中应避免日晒、雨淋及重压。

**【配件清单】**医用牙齿脱敏膏、说明书。

【有效期】 二年

【生产日期/生产批号】 见外包装

【生产许可证编号】 晋药监械生产许20200012号

【注册证编号】 晋械注准20232170061

【产品技术要求编号】 晋械注准20232170061

【注册人名称/生产企业】 山西健康之路医疗器械有限公司

【注册人住所/生产企业住所】 侯马经济开发区科技创新孵化园标准厂房1栋厂房

【生产地址】 侯马经济开发区科技创新孵化园标准厂房1栋厂房，曲沃县乐昌镇苏村东华街1号

【生产企业电话】

【售后服务单位】

【售后服务电话】

【说明书编制日期】 2023年05月18日

请仔细阅读产品说明书并在医务人员指导下购买和使用