

病房式流量可控TYP-96氧气吸入器

产品名称	病房式流量可控TYP-96氧气吸入器
公司名称	北京鸿博龙净科技有限公司
价格	90.00/台
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区地盛南街甲1号1号楼 二层A209
联系电话	010-56230117 13699284043

产品详情

病房式流量可控TYP-96氧气吸入器

墙插式氧气吸入器：工作压力为0~0.3Mpa不可调流量为0-10L/min可调

病房式流量可控TYP-96氧气吸入器

流量计采用浮标式流量计，流量计刻度指示可以选择0~10L/min，也可以选择0~15L/min的刻度有三种湿化瓶体可供选择，瓶体材料采用高质量耐压透明聚脂材料（PolyCarbon）气体快速插头可选择多种标准的插头，包括美标、英标、德标或其它标准，有特殊要求者可根据客户要求要求进行加工定做。有安全阀，在压力超过一定值时，安全阀迅速打开以进行快速泄压。流量计与湿化瓶的连接件可有多种型式供客户选择，依客户的使用喜好而定。

病房式流量可控TYP-96氧气吸入器

流量计采用100%黄铜加工并经镀铬处理

湿化瓶的瓶盖有两种款式供用户选择

2、瓶插式氧气吸入器

1.进气压力为15Mpa，出气压力为0~0.3Mpa可调

2. 流量为0-10L/min可调

流量计采用浮标式流量计，流量计刻度指示可以选择0~10L/min，也可以选择0~15L/min的刻度

病房式流量可控TYP-96氧气吸入器

有三种湿化瓶体可供选择，瓶体材料采用高质量耐压透明聚脂材料（PolyCarbon）

减压器采用全铜芯制作，质量可靠，外观美观，采用直径2寸的高品质压力表

减压器与氧气瓶的连接可按用户的要求进行定制加工，可提供不同制式的螺纹连接方式。

有安全阀，在压力超过一定值时，安全阀迅速打开以进行快速泄压。

湿化瓶的瓶盖有两种款式供用户选择

流量计与湿化瓶的连接件可有多种型式供客户选择，依客户的使用喜好而定。

六、 使用说明

加蒸馏水到湿化杯内，瓶体内水位不能高于上水线，但也不得低于下水线。禁止用生理盐水代替。

吸入器插入供氧终端插座前应当先关闭流量调节开关，并调整氧气快速插头方向，然后将快速插头对准供氧终端插座孔插

病房式流量可控TYP-96氧气吸入器

入，当听到“咔嚓”声响和看到供氧终端插座的锁紧套自动滑动时，说明快速插头与供氧终端插座已连接锁住。 供氧前先将吸氧管插入输氧接头，再逆时针方向转动流量调节开关开启起源，使浮球缓慢上升（浮球中心所对准的刻度线为流量读数，单位为升/分），可根据需要进行调解供氧量。

吸入器在供氧过程中，如吸入器瓶体内的水低于下水线时，应及时关闭流量调节开关，拧下湿化瓶体，按本项第一条的要求加上蒸馏水，在拧上吸入器瓶体，继续供氧。

吸入器停止使用时，应关闭吸入器气源；如需取下时，应用手握住吸入器，进行后取下（不同供氧终端插座的解锁方法由工程安装单位负责解释），然后到掉瓶体内的水进行清洗消毒后，存放于无腐蚀和通风良好的室内）。

病房式流量可控TYP-96氧气吸入器

七、 设备组成

流量计

湿化瓶

气体终端快速插头

减压器（瓶插式使用）

氧气吸入软管及面罩