

艾暖三型医用冰袋降温冰袋急救冰袋冷敷冰袋

产品名称	艾暖三型医用冰袋降温冰袋急救冰袋冷敷冰袋
公司名称	青岛沃普艾斯日用品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Inuan/艾暖 规格:100g/180g 产地:山东省青岛市
公司地址	青岛市市南区香港中路18号福泰广场A1002户
联系电话	18863996556 18863996556

产品详情

【产品名称】 医用冰袋

【型号规格】 型号：OP1S-BD-III 规格：100g

【产品描述】 由降温物质和名种形式的外套及固定器具组成。(OPIS-BD-I 由食用羧甲基纤维素钠、高吸水性树脂材料、纯化水或蓄冷剂组成。OPIS-BD-II 由纯化水、蓄冷剂组成。OPS-BD-III 由纯化水、纤维素、着冷剂组成。)降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，不应包含附录所列成分。非无菌产品。

【预期用途】 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤

【禁忌症】 对本品过敏或有开放性伤口的情况下禁用。

【使用说明】 III型产品初次使用时，捏破里袋，料动冰袋，敷于患处，使用后妥善保存；再次使用时将产品放置在(-15±5) 冷冻15mn~20min后，将其固定在需要冷敷的部位。

【注意事项、警示以及提示的内容】

- 1、本品不与人体皮肤直接接触，使用时请用毛巾或棉布包裹，以免温度过低，造成冻伤；
- 2、对婴幼儿、昏迷患者等不能表达自己意愿的人要经常检查冷敷部位，防止冻伤；
- 3、III型产品再次使用时，如有破损，不能使用；
- 4、本品仅用于闭合性软组织，使用本品前应咨询医生或遵医嘱；
- 5、禁止用尖锐物划伤本品，冰袋破损渗漏请勿继续使用；

6、如内容物沾到皮肤、衣物等处，请及时用温水洗净，万一测入眼睛，请及时用清水冲洗。

【安全使用的特别说明】

1、请放置在儿童接触不到的地方，以防发生误食等意外。

2、儿童需在家长的指导、监督下使用。

【产品维护和保养方法，特殊储存、运输条件、方法】于阴凉干燥且无腐蚀性气体处存放。利用交通工具常温下运输，防止雨淋。**【医疗器械生产备案凭证编号】**鲁青食药监械生产备20150011号

【医疗器械备案凭证编号/产品技术要求编号】鲁青械备20150065号

【产品有效期】四年