

低温康复设备 低温冲击镇痛仪

产品名称	低温康复设备 低温冲击镇痛仪
公司名称	武汉康德庆生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	制冷剂:二氧化碳 型号:CR-800 产地:河南
公司地址	武汉东湖开发区高新大道858号生物医药产业园6A-1栋（自贸区武汉片区）
联系电话	18530855281 18530855281

产品详情

低温康复设备 低温冲击镇痛仪

低温冲击镇痛仪（CR800-BF）采用新的神经性低温刺激技术，通过喷枪喷射出高压、超低温的CO₂，直接作用于治疗部位，形成干冰微晶，干冰迅速升华转变成气体吸收大量的热量，使受损组织及组织周围环境的温度迅速下降，治疗区域温度在较短时间内骤降至4℃以下，引起神经肌肉系统温度觉、痛觉、压力觉和触觉通过皮肤感受器传导到大脑皮层，中枢神经系统产生一系列的神经反射，并引起大量的生理反应：如反复的血管舒缩、血管透过性的恢复，从而产生“热冲击”；同时，热冲击效应加速淋巴回流，使渗出液被再吸收并通过静脉和淋巴系统移除，后达到镇痛、消肿、抗炎、肌松的治疗效果。

减轻或消除疼痛、减少或抑制炎症、提高受影响关节的功能、降低受伤部位血流、对神经系统的影响及血管舒缩效应等。

其他部位：急慢性软组织损伤引起的疼痛、血肿、水肿、术后康复。

3

适用科室

骨科、口腔科、疼痛中心、运动医学中心、康复中心、内分泌科、急诊科、治未病中心、外科、中医科、美容科、整形外科、烧伤科等。

产品特点

治疗枪自主研发：产品主要核心部件治疗喷枪，从设计研发及关键部位加工均为自主完成，已获得中国发明专利；

触摸屏控制：7英寸触摸屏配置，触感灵敏，操作方便，显示清晰；

蓄电池电源动力：机身内置蓄电池，无需外接电源可待机工作10小时以上，拓宽治疗环境使用界限；

电控锁一键启动：机身打开设计为电控锁控制方式，可一键自动开启仪器前盖，减少更换气瓶时的手工拆卸，省时省力；

双气瓶启动切换：具有双瓶自动切换功能，当其中一个气瓶气量低时会自动切换至另外一个气瓶，有效减少治疗中断，提高治疗时效；

电/气量检测：具有气量检测、电量检测功能，可显示余量情况，治疗工作一览无余；