

口腔含漱液是由糖精钠、磷酸、柠檬酸、氢氧化钾、甘油、苯甲醇、卡波姆均聚物A、聚山梨醇酯60、纯化水为辅料制成的液体

产品名称	口腔含漱液是由糖精钠、磷酸、柠檬酸、氢氧化钾、甘油、苯甲醇、卡波姆均聚物A、聚山梨醇酯60、纯化水为辅料制成的液体
公司名称	河南省兴优医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州高新区玉兰街62号
联系电话	17888553268 18530953220

产品详情

注册证号：吉械注准 20172640130
产品技术要求号：ZC20160329

生产许可证号：吉食药监生产许 20170023 号

产品主要结构及组成：该产品是由口腔含漱液和溶液瓶组成。口腔含漱液是由卡波姆为主要原料，糖精钠、磷酸、柠檬酸、氢氧化钾、甘油、苯甲醇、卡波姆均聚物A、聚山梨醇酯60、纯化水为辅料制成的液体，溶液瓶采用口服液体药用聚酯瓶。

羧基含量：本品每100g中含羧基（-COOH）应为0.20-0.40g。

适用范围：本品通过在溃疡表面形成保护膜，物理遮蔽创口，缓解因口腔溃疡、口腔炎症、牙箍或假牙造成的微小创口所带来疼痛。

用法用量：打开包装，取出量杯，一次约5-10毫升，每天3-5次，十天为一疗程。

禁忌症：对本品过敏者禁用。

注意事项：1、本品性状发生改变时禁止使用
2、偶见口腔短暂低热不适，可自行消失不影响疗效。 3、产品请在有效期内使用。
4、按说明书要求贮存产品 5、内包装袋破损，禁止使用。
6、产品为无菌医疗器械，打开包装后，尽快使用，10天内使用效果**。
7、孕妇、哺乳期妇女、儿童请在医生指导下使用。

贮藏运输：密闭、避光、在阴凉处贮存。运输中防雨淋、曝晒及污染。

有效期限：三年

灭菌方式：辐射灭菌

警示：一次性使用；若包装破损或超过有效期，严禁使用。