

一次性使用创口贴、创可贴

产品名称	一次性使用创口贴、创可贴
公司名称	温州奥祥医疗用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市金乡镇东店包街398号
联系电话	86-057768101922 18815028222

产品详情

一、产品名称：

创可贴（平布型）

二、产品基本结构

创可贴及组成由无纺布基带、医用压敏胶层、吸水垫和隔离纸组成。

三、产品性能：

无菌、无皮肤刺激、致敏和细胞毒性。

四、规格、型号：40mm × 10mm 72mm × 19mm 70mm × 18mm 70mm × 17mm 70mm × 40mm

76mm × 38mm 72mm × 25mm 60mm × 70mm 60mm × 90mm
60mm × 100mm 22mm

特殊规格按订货合同规定。

五、适用范围：

适用于浅表性创伤、擦伤等患处的外敷。

六、使用方法：

使用前先检查产品的外包装是否完好，灭菌日期是否有效。然后按包装上箭头所示方向打开包装，注意无菌操作；先将创可贴一侧的隔离纸或瓦楞膜由内向外侧方向揭下，并将揭后的创可贴紧贴伤口，一手

轻抚创可贴表面，用另一只手将剩下的另一半隔离纸或瓦楞膜揭掉，最后用手压抚创可贴表面，胶面紧贴皮肤即可。

七、禁忌症：

对基材或敷芯材料过敏者慎用。

八、灭菌方法：

本产品经环氧乙烷灭菌。

九、注意事项及警告：

- 1、包装破损严禁使用；
- 2、产品过有效期后严禁使用；
- 3、严禁重复使用；

十、贮存、储运条件：

应贮存在相对湿度不超过80%，温度在0 -35 范围内，无腐蚀性气体和通风良好清洁的室内。

十一、有效期：

经包装的创可贴在遵守储运、贮存和使用规则的条件下，自灭菌之日起，有效期为二年。