

## 静脉曲张袜分为以下几级压力 一级低压预防保健型(15-25mmHg):适用于静脉曲张、血栓高发人群的保健预防

产品名称	静脉曲张袜分为以下几级压力 一级低压预防保健型(15-25mmHg):适用于静脉曲张、血栓高发人群的保健预防
公司名称	河南省兴优医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州高新区玉兰街62号
联系电话	17888553268 18530953220

## 产品详情

皓喜康静脉曲张袜分为以下几级压力

一级低压预防保健型(15-25mmHg):适用于静脉曲张、血栓高发人群的保健预防;

一级中压初期治疗型(25-30mmHg):适用于静脉曲张初期患者;

二级高压中度治疗型(30-40mmHg):适用于下肢已经有明显的静脉曲张(站立时静脉血管凸出皮肤表面), 并伴有腿部不适感的患者(如下肢酸

乏肿胀、湿疹瘙痒、抽筋发麻、[色素沉着](#)等)、[静脉炎](#)

、怀孕期间严重静脉曲张、静脉曲张手术后(大小隐静脉剥脱术)患者、[深静脉血栓形成](#)后综合症患者;

### 三级高压重度治疗

型(40-50mmHg):适用于下肢高度肿胀

、溃疡、皮肤变黑变硬、高度[淋巴水肿](#)、整形[抽脂](#)术后恢复期等患者。

#### 2、根据病变部位选择静脉曲张袜的长度:

中统袜(膝下)、长统袜(及大腿)、[连裤袜](#)(及腰部)

如果穿者只是膝盖以下的部位患有静脉曲张，穿中统静脉曲张袜即可;如果穿者膝盖以上的部位也有症状、需要穿长统的或者连裤型静脉曲张袜。

#### 3、确定合适的号型

(静脉曲张袜分为小号S、中号M、大号L、加大号XL)

量出穿者腿部的三个主要尺寸(厘米):[脚踝](#)([脚脖子](#)

\*细处)周长、小腿肚\*大周长及大腿\*大周长，以确定合适的号码，购买连裤袜要根据穿者的身高体重选择号码。