

宝宝必备 电子体温计 电子体温计 婴儿用品 10支起批

产品名称	宝宝必备 电子体温计 电子体温计 婴儿用品 10支起批
公司名称	东阳乌乌玩具有限公司
价格	3.00/个
规格参数	品牌:自产 产地:浙江 规格:12*1.5*1CM
公司地址	中国 浙江 东阳市 东阳上坞工业园区
联系电话	86 0579 13735774280 13735774280

产品详情

品牌	自产	产地	浙江
规格	12*1.5*1CM	货号	001

电子体温计（小号）特价供批发（注：10支起卖）

本产品具有快速显示读数、“哔、哔”声鸣叫提示、精确度高、高低温报警、耗电量省、记忆存储和自动关机的功能；测量温度一般在40秒到90分钟之间。测量精度： $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 工作温度是： $0 - 55$ 工作湿度是80%，工作电压是1.5v，电池寿命：约3年（以1天使用10分钟计算），可更换电池，确保长期使用。净重：约15克安全又实用的电子温度计，不再担心孩子使用传统温度计时因玻璃破碎而引起水银中毒等不良后果。而且能在很短的时间内准确测试出体温，为家居必备之用品。专为婴儿设计，探热时间约为1分钟，测量精度达0.1度，带声音提示，记忆功能。可用于口腔量法、腋下量法及直肠量法。【使用方法】1，使用前，应先用酒精对体温计传感头进行消毒2，按压电源键，蜂鸣器会发出蜂鸣声，显示提示符号3，随后，显示器显示上次测量的温度，并持续2秒钟，接着显示器 $^{\circ}\text{C}$ 符号闪烁，表示已处于待测状态4，将体温计传感头放入测量部位，显示器显示温度逐渐上升。同时 $^{\circ}\text{C}$ 符号闪烁，表示测量进行中。测量中如连续16秒温度不变，则 $^{\circ}\text{C}$ 符号停止闪烁，表示体温测量完毕并已记忆测量结果，即可读取显示出的温度值5，测量结束后，如没有按压电源键关闭电源，则若干分钟后自动关机6，友情提醒：温度计使用时，打开电源后，先等20秒左右再测比较准。

【小常识】人体温度似身体健康状态的晴雨表，正常的体温一般在 $36^{\circ}\text{C} \sim 37.3^{\circ}\text{C}$ （以口腔温度为准）， $37.4^{\circ}\text{C} \sim 38^{\circ}\text{C}$ 为低度发烧， $38.1^{\circ}\text{C} \sim 39^{\circ}\text{C}$ 为中度发烧， $39.1^{\circ}\text{C} \sim 41^{\circ}\text{C}$ 为高度发烧，大于 41°C 为超高度发烧；人的通常口探温度为 36.8°C ，腋探比口探约低 $0.3^{\circ}\text{C} \sim 0.5^{\circ}\text{C}$ ，肛探比口探约高 $0.3^{\circ}\text{C} \sim 0.6^{\circ}\text{C}$

友情提醒：测腋下请在原基础上+0.5度，早上人体体温计偏低0.5度。建议以测口腔为标准。

