

# 心理投射交互系统V1.0

产品名称	心理投射交互系统V1.0
公司名称	北京五二五科技有限责任公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:五二五 型号:LTJH03 产地:北京
公司地址	北京市石景山区西井路15号1幢1层01-1038室
联系电话	13439585489

## 产品详情

一、测验简介心理投射交互系统通过向被试者呈现标准化的墨渍偶然形成的模样刺激图版，让被试自由地看并说出由此所联想到的东西，然后将这些反应用符号进行分类记录并加以分析，进而对被试人格的各种特征进行诊断。二、测验方法本系统中使用的是瑞士版的墨渍图。共由10张卡片构成，其中5张为黑墨渍，2张为黑墨渍加红墨渍，另3张为彩色墨渍，每一张标准墨渍图均是左右对称的浓淡墨渍。心理投射的测验可分为四个阶段:(1)、自由反应阶段：即自由联想阶段，在这一阶段，主试向被试提供墨渍图，一般的指导语是“你看到或想到什么，就说什么”。应避免一切诱导性的提问，只是记录被试的自发反应。主试不仅要尽量原原本本地记录被试的所有言语反应，而且也要对他的动作和表情给以细心的注意和记录。此外，要测定和记录呈现图版之后到作出第一反应的时间，以及对这一张图版反应结束的时间。(2)、提问阶段：确认被测自由反应阶段所隐藏的想法的阶段。主试以自由联想阶段的记录材料为基础，通过提问，以清楚地了解被试的反应利用了墨渍图的哪些部分，以及得出回答的决定因子是什么。(3)、类比阶段：针对提问阶段尚未充分明白的问题而采取的补充措施。主要是询问被试对某个墨渍图反应所使用的决定因子，是否也用于对其他墨渍图的反应，从而确定被试的反应是否由某个决定因子的存在。(4)、极限测验阶段：当主试对被试是否使用了某些部分和决定因子还存在疑虑时，加以确定。在测验过程中，主试以记号对各种反应进行分类，并计算各种反应的次数，以便在\*\*数、百分率、比率等方面进行比较。三、软件功能介绍1、测量软件有全面的系统设置功能，并支持多级用户管理。2、测验界面将图形直接显示出来，被测只需点击对应的图片即可完成选择，非常方便。3、在测试中间可以随时停止测试，回来后接着测试。4、在测试中间系统拥有断电续评功能，保证测评数据的完整性。5、可以根据评分结果自动计算得分及报告。6、测验数据实现了数字化的管理。7、软件中可以进行数据备份和数据还原，增加了安全系数。8、软件服务器端支持一键快速安装，无需其他任何数据库和服务器配置，装完即可使用。9、软件可运行于普通台式机、笔记本电脑、触摸互动一体机等硬件平台上。10、软件可安装应用于Windows系列版本上。