

犬伤预防处置门诊 专用犬伤处置设备

产品名称	犬伤预防处置门诊 专用犬伤处置设备
公司名称	武汉康德庆生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	模式:自动冲洗 功能:加热带打印 耗材:专用冲洗液
公司地址	武汉东湖开发区高新大道858号生物医药产业园6 A-1栋（自贸区武汉片区）
联系电话	18530855281 18530855281

产品详情

犬伤预防处置门诊 专用犬伤处置设备是以狂犬病伤口暴露规范及指南为框架设计研发而成，利用流动清水及专用犬伤弱碱性皮肤黏膜伤口清洗消毒剂交替冲洗15分钟，最后用生理盐水冲洗伤口，冲洗完成后自动打印冲洗报告，减少狂犬病暴露伤口病毒数量，大大降低狂犬病发作几率，保护患者生命安全。标准化犬伤处置门诊必备伤口冲洗设备，以狂犬病伤口暴露处置规范和狂犬病伤口暴露处置指南为标准，狂犬病暴露预防处置门诊——犬伤冲洗机完全满足规范要求：利用一定压力清水和弱碱性皮肤黏膜冲洗消毒剂交替冲洗15分钟，最后用生理盐水冲洗伤口，避免其它冲洗剂残留。暴露后伤口处置

尽早进行伤口局部处理； 尽早进行狂犬病疫苗接种；

需要时，尽早使用狂犬病被动免疫制剂(狂犬病人免疫球蛋白、抗狂犬病血清)。(1)伤口的外科处置 暴露后处置有两个主要目标，一是预防狂犬病的发生，二是预防伤口发生继发细菌感染，促进伤口愈合和功能恢复。对于II级和II级暴露，的伤口处理是非常重要的。伤口处理包括对伤口内部进行的冲洗、消毒以及后续的外科处置，这对于预防狂犬病发生，避免继发细菌感染具有重要意义。 伤口冲洗:用肥皂水(或其他弱碱性清洗剂)和一定压力的流动清水交替清洗咬伤和抓伤的每处伤口至少15分钟。如条件允许，建议使用狂犬病专业清洗设备和专用清洗剂对伤口内部进行冲洗。最后用生理盐水冲洗伤口以避免肥皂液或其他清洗剂残留。 规范动物致伤(犬伤)门诊 伤口清洗配置：

一：医用外伤冲洗器（二类器械）二：多功能清洗池 三：便携式打印机 医用外伤冲洗器（二类器械）I

水压：三档可调，8-12PSI，满足不同需求；I水流：1.4L/Min-3L/Min,大水，清洁程度高；I

时间：4个周期共16'41"，各周期科学分配，保障清洗效果；I

水温：PID智能温控，进水温度 5 设备正常工作，出水温度在30-40 适宜区间，且有过热停机保护设置；I配置专用清洗枪万向支架；I智能小巧，安装便捷。