

# 犬伤医用创口冲洗机—专用外伤冲洗设备

产品名称	犬伤医用创口冲洗机—专用外伤冲洗设备
公司名称	武汉康德庆生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	冲洗模式:脉冲式冲洗 功能:加热带打印 耗材:专用犬伤冲洗液
公司地址	武汉东湖开发区高新大道858号生物医药产业园6A-1栋(自贸区武汉片区)
联系电话	18530855281 18530855281

## 产品详情

犬伤医用创口冲洗机—专用外伤冲洗设备是一款专用于动物咬伤、抓伤(犬咬伤、猫抓伤、家禽致伤、野生动物致伤)的伤口消毒冲洗设备,犬伤冲洗设备以“狂犬病伤口暴露处置指南和狂犬病伤口暴露处置规范”为框架结合临床研发而成,犬伤冲洗机具有自动冲洗和手动冲洗两种模式,自动冲洗模式下,设备接入专用犬伤弱碱性皮肤黏膜伤口冲洗液和流动清水和生理盐水,自动实现交替冲洗伤口,具有脉冲冲洗功能,可以彻底有效清除伤口内嵌杂物和减少细菌病毒数量,设备具有加热功能,保证冲洗液体温度和体温相近,减少伤口刺激,冲洗完成后自动使用生理盐水将伤口冲洗干净,整个冲洗流程不少于15分钟,冲洗完毕后设备自动打印冲洗凭条,由患者和医生同时签字留档保存。犬伤冲洗设备功能简介  
自动冲洗功能:该模式下自动实现15分钟犬伤弱碱性冲洗液+流动清水交替冲洗,适用于各类动物致伤、抓伤,例如(犬咬伤、猫抓伤、家禽致伤,野生动物致伤等)手动冲洗功能:该模式可选择消毒液冲洗、清水冲洗、生理盐水冲洗三个选项,可以使用生理盐水快速清洗各类急性创面,例如(车祸伤、事故伤、利器伤、刀砍伤、伤等急性创面)

管路自洁功能:冲洗完成后可以使用该模式清洗并排清管路内废液,避免细菌滋生。

自动打印功能:冲洗完毕后,内置打印机自动打印冲洗凭证,留档保存,减少医患。

脉冲冲洗功能:自动冲洗和手动冲洗模式下,冲洗液以一定频率脉冲进行冲洗,冲洗更干净彻底。

标准化犬伤门诊建设设备要求:犬伤专用伤口冲洗设备(犬伤医用伤口冲洗机)

犬伤冲洗高低位冲洗池(医用外伤冲洗床、医用外伤池)疫苗冷藏柜消毒设备等犬伤伤口分级:

级暴露:完整皮肤接触或者喂饲风险动物;完好的皮肤被舔。

无风险,需清洗暴露部位,无需进行医学处置。

级暴露:裸露的皮肤被轻咬;无明显出血的轻微抓伤、擦伤。低风险,要进行专

业伤口处置及疫苗接种。确认为级暴露且严重免疫功能低下者,或者级暴露位于头面部且致伤动物不能确定健康时,按照级(高风险)暴露处置。级暴露:单处或多处贯穿性皮肤咬伤或者抓伤;破损皮肤被舔舐;黏膜、开放性伤口被污染;直接暴露于蝙蝠。

高风险,需要进行伤口处置、疫苗接种及根据既往免疫情况决定使用被动免疫制剂。

犬伤伤口正确处理方法一旦受到犬伤,一定要尽快处理伤口,完整流程包括:伤口处理(伤口冲洗 清创 消毒) 注射疫苗和免疫球蛋白(必要时),必要时还要缝合伤口。伤口处理:伤口处理包括的冲洗和消毒处理。对于防止发生,伤口处理与注射疫苗同样重要。应去正规机构清洗伤口,去专业的犬伤

门诊。如果不能立刻就诊，建议尽早自行清洗伤口，方法是：用肥皂水（或其他弱碱性清洗剂）和一定压力的流动清水（如自来水）交替清洗咬伤和抓伤伤口，每处伤口至少冲洗约15分钟。

自行清洗伤口后，应尽快去专业机构接受伤口处置。消毒和外科处理，应由专业人士进行。犬伤专用弱碱性伤口冲洗液：产品名称：创口清洗消毒液 产品特点：

1、特点：有CMA资质的检测机构出具的狂犬病毒灭活试验报告；

2、pH值：pH值大于8的弱碱性消毒液，符合《狂犬病毒暴露预防处置工作规范》（2009版）、《狂犬病预防控制技术指南》的要求；

3、剂量：260ml/瓶，大剂量，清洗效果更好；

4、配方：复合制剂，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌均有杀灭作用，可用于感染常见细菌消毒；

5、包装：瓶装、袋装，自毁瓶盖；常温避光贮存。犬伤伤口冲洗高低位冲洗池：

外形尺寸：长1300\*宽800\*高600（mm）材质：玻璃钢（结实、耐用）

特点：方便冲洗头部、脸部、手臂及大腿部位的伤口 便于使用后清理，废水经下水器自动排出

外观美观、占地空间小方便患者舒适冲洗 狂犬病暴露创口冲洗专用设备 犬伤冲洗机、犬伤创口消毒冲洗器能有效降低伤患创口病毒数量，极大提升狂犬病预防有效性，以完全符合国家规定的处置程序有效保障犬伤门诊的权益，专业的冲洗清创设备可显著降低对门诊处置水平的要求，减轻处置人员的工作负担。狂犬病暴露创口冲洗专用设备 犬伤冲洗机、犬伤创口消毒冲洗器（犬伤冲洗机）适用于各种犬伤、擦伤、伤等外科新鲜创面。狂犬病暴露创口冲洗专用设备 犬伤冲洗机、犬伤创口消毒冲洗器采用脉动压力技术，使用特制枪头，采用无菌包装的弱碱性皮肤黏膜消毒液，通过自动化控制程序全自动完成高标准的犬伤创口冲洗处置。