

兴优防护喷剂的喷雾器调至合适的雾化程度，将喷雾器对准需要防护的目标区域，轻轻按下喷雾器的按钮

产品名称	兴优防护喷剂的喷雾器调至合适的雾化程度，将喷雾器对准需要防护的目标区域，轻轻按下喷雾器的按钮
公司名称	河南省兴优医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州高新区玉兰街62号
联系电话	17888553268 18530953220

产品详情

使用方法

1. 确认使用环境在使用兴优医用射线防护喷剂之前，需要确认使用环境是否符合规定的安全标准，并且必须由经过相关培训的专业人员进行操作。

2. 准备工作

将兴优医用射线防护喷剂两瓶装放置在通风、干燥的地方，确保喷雾器的清洁和正常工作状态。

3. 喷雾操作将防护喷剂的喷雾器调至合适的雾化程度，将喷雾器对准需要防护的目标区域，轻轻按下喷

雾器的按钮，均匀地喷洒在目标区域上，保证形成一个均匀、致密的涂层。

4. 喷雾次数 根据实际需要，可以根据患者的具体情况和医生的建议，多次喷洒兴优医用射线防护喷剂，以增强防护效果。

5. 喷雾面积 根据需求，可根据具体情况选择喷雾的面积，确保完全覆盖需要防护的区域。