

牛羊怀孕早知道牛羊用测孕仪

产品名称	牛羊怀孕早知道牛羊用测孕仪
公司名称	郑州豪润奇电子科技有限公司
价格	8900.00/件
规格参数	
公司地址	商务内环路26号楼2102室
联系电话	13938565797 13938565797

产品详情

牛羊怀孕早知道牛用测孕仪，牛羊在配种20天左右，使用牛羊测孕仪即可测试牛羊怀孕与否，可以尽早查找原因，淘汰空怀母牛羊，降低养殖成本。早孕监测的经济效益和社会效益是相当可观的。牛羊每发现一头空怀就可以减少60 - 80天的无效饲养，可以节约饲养成本350 - 450元。监测结果统计分析，每一百头母牛用兽用测孕仪监测早孕后每年可减少无效饲养费用6500元以上，间接经济效益还包括增加产仔数，提高母牛生产效率，及时发现牛羊群疾病和疫情等。其它动物的效益大致相同，用两天的饲养费用既可节约30天以上时间的饲养费用，可见其生产应用价值相对大。另外，各种动物疾病的检查对提高其经济价值或实用价值都有非常重的意义。

一、牛羊用测孕仪特点：

- 1、具有B、2B/BM/4B/M 五种显示模式，BM与M 模式下有2s、4S、6S、8s 四种扫描速率可调。
- 2、采用多焦点发射、动态孔径接收、宽带大动态低噪声前置放大器、对数压缩3段TGC控制帧相关、灰阶变换边缘增强、分辨率高等
- 4、可以测量距离、周长、面积、推荐、心率、速度、产科、心脏等项目。
- 5、图像存储：1024副图像久存储支持192帧大容量电影回放功能
- 6、支持U盘及SD卡图像读写7、支持BMP 格式和DICOM格式图像读写
- 8、通过图像采集软件，可将图片及时的上传到计算机上。
- 9、图像有上下、左右、黑白翻转的功能
- 10、图像中增益、亮度、对比度的调节。

- 11、支持升功率输出调节。
- 12、支持多种探头并可4中扫描频率
- 13、具有穿刺引导功能
- 14、支持彩色界面、超声区伪彩色显示功能
- 15、具有体位标志、图像区注释功能
- 16、预设置功能、可以设置时间医院名称胎重公式保存图片格式伪彩色选择等
- 17、支持中文输入
- 18、支持USb鼠标操作

二、牛羊用测孕仪测孕操作程序

- 1.清理牛羊的直肠中的排泄物。
- 2.接着用手触诊对怀孕状况进行初步估计以确定将要用牛羊测孕仪扫描的组织
- 3.手握直肠探头一起插入牛的直肠，手要握紧探头，以保证后面发生的任何情况都能首先被手感觉到，手靠背侧，放在直肠壁和换能器之间。
- 4.牛的内部结构被显示在屏幕上，在纵向交叉的部分是膀胱，随后是宫颈组织和宫体。横向观察，子宫角通常看起来是圆形结构的。探头在腹背面内移动，直到观察到宫角和宫体的结合部，然后慢慢向宫角方向偏转，
- 5.测量胎儿躯干直径，应该选择一个纵断面，即：从两侧穿过胎儿脖子，胸腔和腹部的平面。躯干直径可以在怀孕60到150天之间测量。
- 6.按照测量距离的方法测量选定参数距离值，对应的孕龄数据自动显示在“G.A”后面

三、牛羊用测孕仪简单故障可对照以下进行简单处理。

- 1.电源适配器指示灯不亮。（检查供电电源、检查适配器电源线机插头）
- 2.主机电源指示灯不亮。（检查主机内的电池是否放反了，或者安装不到位而引起电池与弹片接触不良）
- 3.显示屏上出现间断条纹干扰，雪花状干扰。（检查适配器供电电源，供电电源受其他设备打火干扰造成、环境检查，仪器周围空间电、磁场干扰造成）
- 4.显示屏上图像显示不清晰。（调节主机总增益、环境亮度太强导致）

四、牛羊用测孕仪探头日常使用的维护与保养：

- 1、探头不能碰撞、强烈震动、不能加热。
- 2、探头使用前涂抹耦合剂，使用后用棉签或软布清理干净，不可涂抹其他油性物质代替耦合剂。
- 3、探头与主机连接好后，不能随意拆卸。
- 4、在暂停诊断时，应放入仪器盒内，按下冻结键，让探头处于冻结状态。
- 5、探头结束工作后，一定先断电在拔出探头。

五、牛羊用测孕仪售后服务

产品自购买日起一年内保修

注意：非正常使用自行拆机造成的损坏不在保修期内。

提示：请妥善保管你的保修卡和购买凭据以备保修之用